
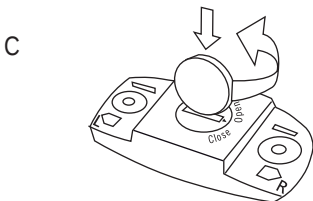
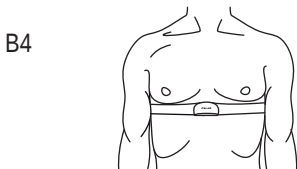
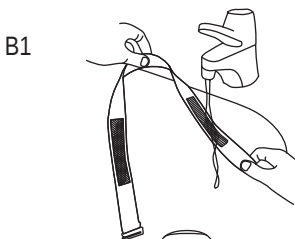


Polar WearLink® + Transmitter Bluetooth

使用説明書

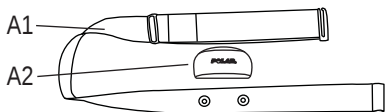

Polar WearLink®+トランスミッター — Bluetooth®

このユーザーマニュアルでは、Polar WearLink®+トランスミッター **Bluetooth®**の使用方法を解説します。 併用可能アプリケーションの一覧は <http://www.polar.fi/support>で確認することができます。

最新のユーザーマニュアルを <http://www.polar.fi/support>でダウンロードすることができます。

使用方法の動画は、
http://www.polar.fi/support/video_tutorialsをご覧ください。

ぜひ、<http://register.polar.fi>でPolar製品をご登録ください。ユーザーの皆様のニーズに合った製品やサービスの向上に役立てます。

トランスミッターの使用法の説明は、前面カバーの絵をご覧ください。

トランスミッター部品

1. ストラップの裏側にある電極部分が心拍数を検知します。 図A1
2. コネクタがトレーニングコンピュータに心拍数信号を転送します。 図A2

トランスミッタを装着する

1. ストラップの電極部分を水道水で十分に濡らします。 図B1
2. ストラップにコネクタを取り付けます。心地よく装着できるようにストラップの長さを調節します。 図B2
3. ぴったりフィットして苦しくない程度に長さを調節します。 図B3
4. 濡れた電極部分が肌に当たっていること、またポラルのロゴが中央で上に向いていることを確認します。 図B4

使用後は毎回、ストラップからトランスミッターを外し、流水ですすいで下さい。

はじめに

はじめてPolar WearLink+トランスミッター **Bluetooth®**をお使いになるときは、トランスミッターとレシーバーのペア設定をおこないます。

Polar WearLink+トランスミッター

Bluetooth®の初期設定の詳細はアプリケーションの製造元による別冊のユーザーマニュアルでご確認ください。

 *PIN*コードを聞かれた場合は、0000と入力します。また*PIN*コードは *WearLink+ transmitter Bluetooth®*のコネクターの裏に記載されています。

Polar WearLink+トランスミッター

Bluetooth®から受信装置への転送範囲を最大限に活かすには、トランスミッターと受信装置を常に近くに置いておく必要があります。ポケットに入れておく、ベルトに固定する、または小さな袋に入れ体の横にかけておくことをお勧めします。受信装置を背中に装着しないでください。(例：背中になるポケットまたはリュックサックなど)

ケアとメンテナンス

Polar WearLink+トランスミッター

Bluetooth®はハイテクノロジーを駆使した製品ですので取扱にはご注意ください。以下の手順に従ってください。

使用後、ストラップからトランスミッターを外します。 やわらかいタオルでコネクタを乾かします。 アルコールまたは研磨剤（鉄製のたわしや洗浄用化学薬品など）を使用しないでください。

5回に一度は40°C/104°Fのお湯で洗濯機で洗って下さい。 ストラップを清潔に保つことで、トランスミッターの寿命を最大限に伸ばすことができ、また正確な測定にもつながります。洗濯バッグをご使用ください。水に浸したり、乾燥した状態で乾燥機にかけたり、アイロン、ドライクリーニングや塩素系洗剤を使用しないでください。

日本語

また塩素系洗剤や柔和剤を使用しないでください。
コネクターを洗濯機あるいは乾燥機に絶対に入
れてはいけません！

**ストラップとコネクターを乾燥させ、別々に保
管してください。** ストラップを長期保管する場
合や高塩素のプールで使用した後は、ストラップ
を必ず洗ってください。

トランスミッターは涼しく、乾燥した場所に保管
します。通気性のない素材（例：スポーツバック
）に濡れた状態で保管しないでください。汗や蒸
気で電極部分が湿り、アクティベートする可能性
があります。長時間直射日光に当てないでくださ
い。

電池

電池をご自分で交換する場合は、以下の手順に従
ってください。図Cをご参考ください。

1. 電池カバーをコインを使って、反時計回りに
回して開けます。
2. カバーに対してプラス（+）極側を向けて電
池(CR2025)を入れます。耐水性を高めるた
め、シールリングが溝の中にしっかりとある
ことを確認します。
3. コネクタのカバーをします。
4. コインを使って、時計回りに回して閉じます
。

電池寿命を最大限にいかすため、カバーは電池を交換するとき意外は開けないでください。また、シールリングが破損した場合は、新しいリングと取り換えます。

シールリング付きの電池キットはPolarの小売店やPolar サービスセンターで購入することができます。アメリカ、カナダでは、シールリングは公認Polar サービスセンターでのみ購入することができます。

 電池は、子供の手の届かないところに保管します。誤って電池を飲み込んでしまった場合は、ただちに医者に連絡してください。電池は、使用地域の法規に従い、廃棄します。



誤った電池に交換した場合は、製品が爆発する可能性がありますので、ご注意ください。

サービス

保障期間中の製品は、本社公認のPolar サービスセンターでサービスを受けてください。サービスセンター以外でサービスに出し、故障/破損した場合は、保証しかねます。詳細はLimited International Polar Guarantee（Polar 国際保証）をご参照ください。

注意

アレルギーに関する情報は、仕様に記載されている素材をご確認ください。 トランスミッターによる肌荒れを防ぐには洋服の上からトランスミッターを装着します。その際、電極部分が当たる洋服の部分を湿らせます。

虫除け薬をトランスミッターの近くに置いたり、使用しないでください。



湿気と磨耗した部分が色の薄い洋服のシミの原因になる可能性があります。

水辺でのトランスミッターの使用

Polar WearLink+トランスミッター

Bluetooth®は耐水性ですが、水中では心拍数を測定しません。

仕様

電池タイプ: CR 2025 (Panasonic社製をお勧めします)

電池シールリング: O-リング 20.0 x 1.0 素材
FPM

Polar WearLink+トランスミッター

Bluetooth® 電池寿命: 使用時間: 150時間

使用環境の温度: 32 °F から 122 °F/ 0 °C から +50 C

コネクタの素材: ポリアミド

ストラップの素材: 35% ポリエステル 35% ポリアミド 30% ポリウレタン

併用性: Polar WearLink+ transmitter

Bluetooth®はPolarトレーニングコンピュータと併用することができません。

 *Polar WearLink+*トランスミッター **Bluetooth®**を直接肌に装着する、または服の下に装着する場合の操作温度は14 °Fから122 °F / -10 °Cから +50 °Cです。

保証および免責条項

Limited International Polar Guarantee

- 本保証は、製品を購入/使用する地域、国の法規が定める消費者法的権利を侵害するものではありません。また、販売/購入の際に交わされる契約をもとにした販売者に対する消費者の権利を侵害するものでもありません。

日本語

- Limited Polar International Guaranteeは、アメリカまたはカナダで本社製品をお買い求めになられた方にPolar Electro Inc.が付与します。 Limited Polar International Guaranteeは、アメリカまたはカナダ以外で本社製品をお買い求めになられた方にPolar Electro Oy.が付与します。
- Polar Electro Inc. / Polar Electro Oyは、本社製品の使用者/購買者に対し、製品の破損および故障の修理などにかかる諸費用を購入日より2年間保証します。
- **領収書は製品の購入を証明します。**
- 本保証は、電池、通常の摩滅、誤使用、不正使用、事故あるいは注意・警告の無視、不適切なメンテナンス、商業目的の使用によるケース/画面の破損/故障、およびゴムストラップ、Polar アパレルの破損は保証いたしません。
- 本保証は、製品に関連する事物（製品本体以外）の直接的/間接的あるいは事故による、結果的あるいは特別な行為による破損/故障は保証いたしません。
- 製品を中古で購入した場合は、地域法に記載されていない限り、2年間の保証を受けることはできません。
- 保障期間中は、製品を購入された地域の本社公認のPolar サービスセンターで修理および交換いたします。

保証は、製品を購入された国のみで有効です。

免責条項

Polar Electro Inc./Polar Electro Oyは、Polar製品によるデータを使用する第3者の製品あるいはサービスにより生じるいかなる事象を保証いたしません。Polar Electro Inc./Polar Electro Oyは、第3者による製品あるいはサービスの機能/故障により生じるいかなる事象、Polar製品との操作で生じるいかなる事象、第3者による製品の安全性、または第3者による製品あるいはサービスにより生じるいかなる事象を保証いたしません。

Polar Electro Inc/Polar Electro Oyは、Polar製品の使用により生じる費用（例：データ転送費など）を保証いたしません。

本製品は次の書類に記載されているPolar Electro Oyの無形権利に保護されています: FI110915, US7324841, EP1362829, FI23471, US D492783S, US D492784S, US D492999S, EU00046107-0001, EU00046107-0002, EU00046107-0003, FI96380, US5611346, EP0665947, JP3568954, FI115084, US7418237, EP1543769.その他、出願中の特許あり。

www.polar.fi

日本語

CE 0537

本製品は93/42/EECと1999/5/ECに準拠しています。本製品に関連するDeclaration of Conformityは www.support.polar.fiでご確認ください。



タイヤつきゴミ箱にバツ印がされているマークが掲載してあるPolar製品は、European ParliamentのDirective 2002/96/ECおよびCouncilのWaste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)が定める電気装置であることを示しています。Polar製品が使用する電池およびアキュムレータは、European ParliamentのDirective 2006/66/EC、またCouncil（2006年9月6日）に定めた「電池／アキュムレータと廃棄電池／廃棄アキュムレータ」に定められた規定内で製造された電池およびアキュムレータであることを示しています。これらの製品と電池／アキュムレータは、EU諸国では分けて廃棄する必要があります。



このマークは、耐電気ショック製品であることを示します。

Bluetooth QD ID: B014698

USA

FCC規定情報: 本装置はFCC規則の第15条に準拠しています。 操作コンディション: (1) 本装置は危害を与える干渉を起こさない、および(2) 本装置は受信する干渉（それにより操作に障害が生じる可能性がある）をすべて

受け取ります。 **注:** 本装置は、テストを重ね、FCC規則の第15条クラスBデジタル装置の条件を満たしています。居住地区での使用において、障害が生じえる干渉から適当に保護されています。本装置は、ラジオ周波数エネルギーを発生、使用および放射します。そのため、説明書に記載されている手順に則り取り付けない場合は、障害を生じさせる干渉が発生する可能性があります。但し、一般的な取り付け時でも干渉が起きる可能性はあります。本装置がラジオまたはテレビの受信時に障害を生じさせる干渉を発生させる（装置をオン、オフすることで確認することができます）場合は、次の手順を行ってください:

1) 受信アンテナの位置を変える。 2) 装置とレシーバーの距離を広げる。 3) レシーバーが接続されているサーキットとは異なるコンセントに装置を接続する。 4) ラジオ/TVの専門家に相談する。 **注意!** 法令遵守を一任する者により、変更および修正が承認されない場合、ユーザーの装置の操作権利を剥奪する可能性があります。

CANADA

Industry Canada (IC)規則情報 本装置はIndustry Canada規則のRSS-210に準拠しています。 操作コンディション: (1) 本装置は危害を与える干渉を起こさない、および(2) 本装置は受信する干渉（それにより操作に障害が生じる可能性がある）をすべて受け取ります。 本クラス[B]装置はカナダのICES-003に準拠しています。



IDA Standards DA104315に準拠しています。

Copyright 2010 Polar Electro Oy, FIN-90440
KEMPELE, Finland.

Polar Electro OyはISO 9001:2000承認会社です。

All rights reserved. Polar Electro Oyの許可なく本マニュアルの複写、転写は禁じられています。本マニュアルあるいは本製品のパッケージに記載されている™マーク付のロゴは、Polar Electro Oyの商標を意味します。ユーザーマニュアルあるいは本製品のパッケージに記載されている「®」マークのついた名前およびロゴはPolar Electro Oyの登録商標です。但し、WindowsはMicrosoft Corporationの商標です。

Manufactured by

Polar Electro Oy
Professorintie 5
FIN-90440 KEMPELE
Tel +358 8 5202 100
Fax +358 8 5202 300
www.polar.fi

POLAR®
LISTEN TO YOUR BODY