


Manual – Web Viewer PACS – Unimed Rio Claro - <http://pacs.unimedrc.com.br>

Atualizado em 29/01/2013

Este documento orienta sobre a utilização do aplicativo Web Viewer para acesso ao sistema PACS (Sistema de Comunicação e Arquivamento de Imagens) da Unimed de Rio Claro.

Os pré-requisitos foram devidamente esclarecidos no documento disponível no link **Orientações para Acesso** do site PACS da Unimed Rio Claro.

A instalação do aplicativo cria um atalho na **Área de Trabalho (Desktop)** do Windows.

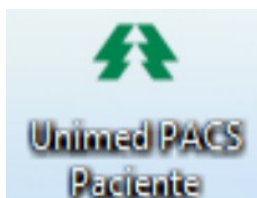

O ícone para acesso de pacientes chama-se **Unimed PACS Paciente**.

Para entrar no aplicativo, basta clicar no atalho.

Caso o atalho tenha sido apagado, siga as orientações de instalação do aplicativo no link **Orientações para Acesso** disponível no site do PACS Unimed Rio Claro.

Ao clicar no ícone, a tela de login do Web Viewer será exibida, conforme imagem abaixo.



O acesso ao sistema é permitido somente para médicos e pacientes do plano de saúde da Unimed Rio Claro.

A identificação (login e senha) para os médicos é a mesma utilizada no site da Unimed Rio Claro para acesso à Linha Direta.

O login e a senha para pacientes podem ser solicitados em atendimento de exame por imagem no Hospital Unimed.

Após digitar o login e a senha, clique no botão **Entrar** e a tela principal do aplicativo será exibida.



Caso o menu lateral não esteja visível, basta aproximar o mouse da região esquerda da tela e ele será exibido.



Para localizar exames médicos, utilize a opção Pesquisa e a tela abaixo será exibida. Nela existem várias opções de pesquisa, podendo selecionar, por exemplo, a modalidade (tipo do exame realizado) e o período.

Para cada pesquisa é necessário clicar no botão **Procurar**

Pesquisa

Pesquisa no Servidor Exames Baixados no Computador

Modalidades

☒ Todas ☒ CR ☒ CT ☒ ES
☒ MG ☒ MR ☒ NM ☒ OT
☒ RG ☒ US ☒ XA

Servidores

PACS_AURORA_URC

Opções de Busca

ID do Paciente:
Nome:
Nº de Acesso:
Data Inicial: 18/10/2012
Data Final: 18/10/2012

Ações

Procurar
Hoje
Ontem
Limpar

Exames Baixados

✓ Total: 4 exames

Resultados da pesquisa


ID Pac...	Nº de Acesso	Paciente	Descrição do Exame	M...	Data	Médico	Laudo	Servidor
18/10/2012 (4 resultados)								
1132603	153159	PACIENTE	TÓRAX ADULTO	CR	18/10/20...	MEDICO	.. Integrado	PACS_AUR...
1132603	153172	PACIENTE	ABDÔMEN - DECÚBI...	CR	18/10/20...	MEDICO	.. Integrado	PACS_AUR...
1132431	153075	PACIENTE	TÓRAX ADULTO	CR	18/10/20...	MEDICO	.. Integrado	PACS_AUR...
1132592	153155	PACIENTE	MÃO	CR	18/10/20...	MEDICO	.. Integrado	PACS_AUR...

Pesquisa
A pesquisa encontrou 4 resultados.

Carregar Abrir Laudo Listar Séries

No centro da tela serão exibidos os exames encontrados nesta pesquisa.


Resultados da pesquisa							
ID Paci...	Nº de Acesso	Paciente	Descrição do Exame	M...	Data	Médico	Laudo
18/10/2012 (4 resultados)							
1132603	153159	PACIENTE	TÓRAX ADULTO	CR	18/10/20...	MEDICO	.. Integrado PACS_AUR...
1132603	153172	PACIENTE	ABDÔMEN - DECÚBI...	CR	18/10/20...	MEDICO	.. Integrado PACS_AUR...
1132431	153075	PACIENTE	TÓRAX ADULTO	CR	18/10/20...	MEDICO	.. Integrado PACS_AUR...
1132592	153155	PACIENTE	MÃO	CR	18/10/20...	MEDICO	.. Integrado PACS_AUR...

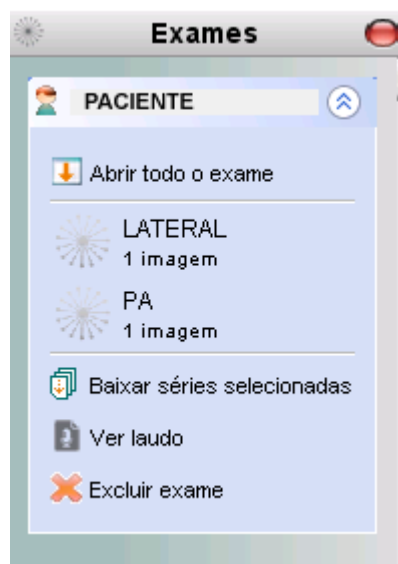

Para abrir o exame e visualizar suas imagens, basta clicar duas vezes sobre o exame escolhido e um menu lateral será exibido.

A principal opção deste menu é **Abrir todo o exame** pois mostra de uma vez todas as imagens encontradas para o exame selecionado.

Ao clicar nesta opção, o aplicativo perguntará sobre como mostrar as imagens:

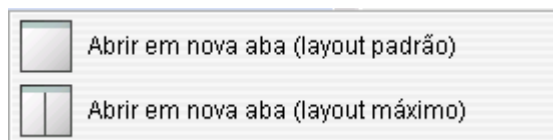


A diferença é que o layout padrão mostra um exame na tela e o layout máximo mostra duas imagens.

Assim que escolher o layout, o centro do aplicativo ficará com fundo preto e um indicador de download será exibido.

Baixando 16,556% 175,781 KiB/s

A velocidade do download pode variar em razão de diversos fatores. Por isso, sugerimos não utilizar simultaneamente outros aplicativos que realizem conexão com a Internet.

Assim que download for concluído, a imagem do exame será exibida conforme abaixo.

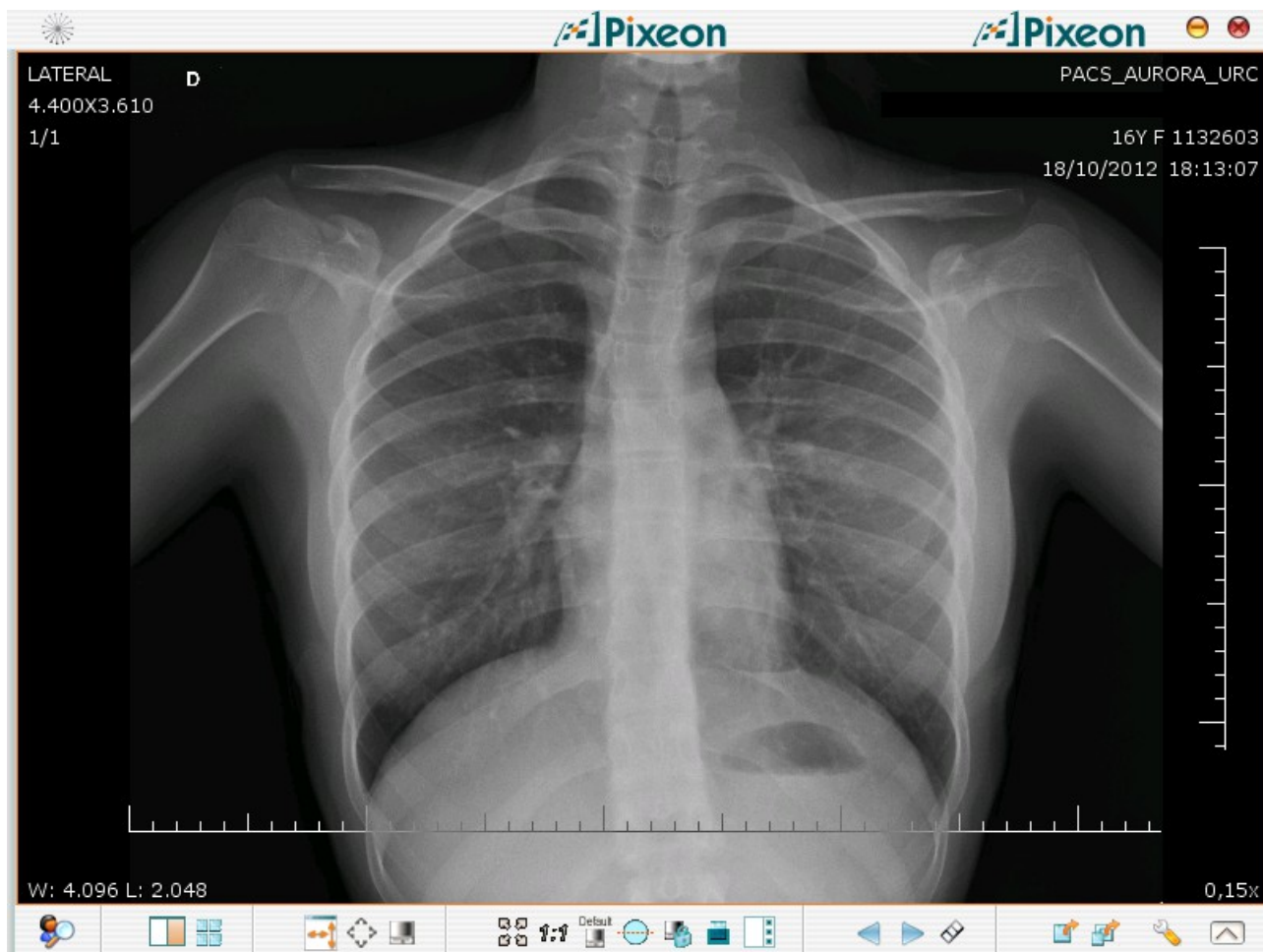

Para ampliar ou reduzir a imagem exibida (Zoom), basta pressionar (e manter pressionado) o botão esquerdo do mouse e movimentá-lo pela tela.

Na parte inferior da tela será exibida a barra com funções úteis para visualização dos exames



As principais funções são:



Retorna para a tela de pesquisa dos exames.



Permite alternar entre várias opções de layout de visualização.



Exibe o painel Ferramentas de Medição que permite, entre outros, medir parte da imagem utilizando o botão direito do mouse.




Ferramenta de Janelamento que permite alterar o brilho e o contraste.



Restaura o tamanho original da imagem.



Paleta de Cores: permite aplicar filtros de cores pré-definidos.

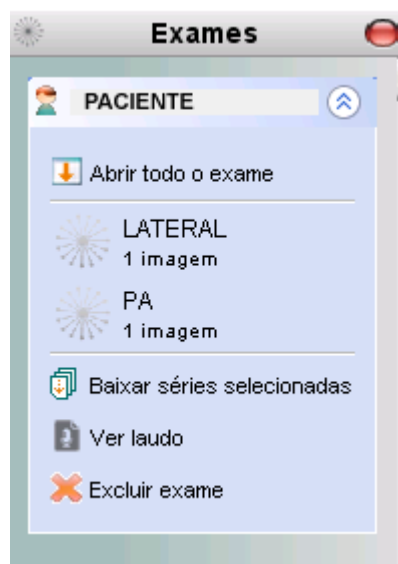

No menu lateral citado anteriormente, também existe a opção **Ver laudo** que exibe o laudo médico se estiver disponível.



Para retornar à tela de pesquisa, basta aproximar o mouse da região esquerda da tela e o menu lateral será exibido.



Na parte superior da tela serão exibidos os botões para minimizar e para sair do aplicativo.




Sempre que o botão minimizar (ícone amarelo) for clicado, o aplicativo deixará de ser exibido na tela mas continuará em funcionamento e o ícone do Web Viewer permanecerá disponível na barra de tarefas do Windows, conforme abaixo.



Para restaurar o programa, bastará clicar duas vezes no ícone.

Sempre que o botão fechar (ícone vermelho) for clicado, o aplicativo solicitará confirmação, conforme abaixo.

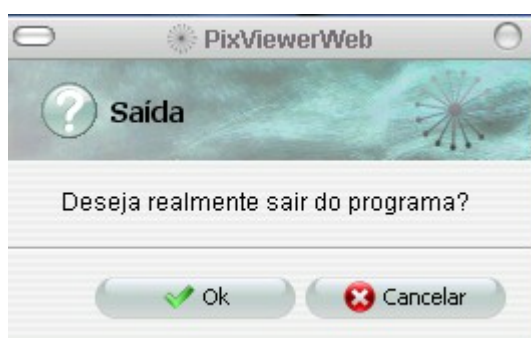

Se clicar no botão Ok estará confirmando e o aplicativo será encerrado. Se clicar no botão Cancelar, o aplicativo será minimizado e permanecerá disponível na barra de tarefas conforme descrito anteriormente.

O arquivo original e atualizado deste documento pode ser obtido no site do PACS Unimed clicando-se na opção **Manual**, conforme figura abaixo.



A equipe do Suporte Técnico da Unimed está à disposição pelo telefone (19) 3526-6749 para auxiliar em eventuais dúvidas.