


Orantech 橙汇

匠 / 心 / 橙 / 品 汇 / 智 / 天 / 下

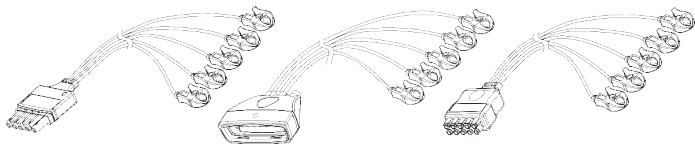

一次性心电导联线使用说明书

医疗器械备案编号: 粤深械备20180424号

医疗器械产品技术要求编号: 粤深械备20180424号

医疗器械生产备案号: 粤深食药监械生产备20190087号

预期用途

- 本产品预期用于与心电监护类设备联合使用,用于传输人体生物电信号,对病人的ECG进行测量。

主要结构组成

- 由患者导联线和主电缆等组成

包装储运条件

- 导联线为单个独立包装。导联线必须存放在原包装内并存放在以下储存条件下,以最大限度地延长心电导联线的使用寿命。

储存条件如下:

环境温度: $-10^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$

相对湿度: $15\%\sim 85\%$

环境气压: $86\text{ kpa}\sim 106\text{ kpa}$

使用方法

- 使心电图线与设备连接,用适配器进行监控,检查仪器操作是否符合操作手册中的操作内容。
- ECG导线电极连接在患者身上,依次连接线,连接过程有序,应避免打结或在监测过程中分线,以免引起心率波动,波形波动干扰等。

有效期

- 2年

警告

- 确保心电导联线结构完整, 没有破损或磨损的电线或损坏的部件。如果发现裂纹或变色, 请检查心电导联线并丢弃。
- 仔细检查设备心电导联线和病人心电导联线, 以避免心电导联线间打结。
- 与患者连接的所有导线, 未正确的连接或连接故障可能会导致读取错误; 高温, 电磁波干扰和危险电源也可影响设备的读数。
- 至少每2小时检查导线和设备的位置, 确定是否安全。
- 根据设备使用说明书的要求, 安装并放置导线右侧。
- 不能同时使用磁共振设备, 否则可能导致患者灼伤。
- 与除颤器连接时, 除颤器电极应尽量远离患者, 否则可能会导致放电电极和患者烧伤
- 线张力或弯曲力强度不得超过5 KGF, 否则可能会导致内部损坏和心电导联线屏蔽性能损失或读数不准确
- 导线金属部件需要保持干燥, 否则会导致故障。
- 请参阅监护仪操作手册的使用。

符号与标志定义

Drantech

制造厂商LOGO



制造厂商

REF

规格型号

LOT

批号

SN

序列号



不含乳胶



非灭菌



单个病人多次
使用



注意



生产日期



废弃电子设备与
垃圾



查阅使用说明



防除颤CF型应用
部件



有效期至



医疗器械




医疗器械唯一标识

支持服务

如需服务支持, 请联系经销商或者橙汇技术团队。

以下是我司产品范围, 欢迎选购更多相关产品!

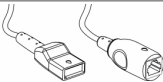			
血氧	心电	无创血压	有创血压
			
体温	二氧化碳	胎监	脑电



备案人: 深圳市橙汇科技有限公司

备案人地址(住所): 深圳市光明区玉塘街道玉律社区第七工业区第1栋401

生产企业: 深圳市橙汇科技有限公司

生产地址: 深圳市光明区玉塘街道玉律社区第七工业区第1栋401

售后服务单位: 深圳市橙汇科技有限公司

电话: 0755-23699939 传真: 0755-23243594

网址: www.orantech.com 邮箱: info@orantech.com



橙汇公众号

REF: M20-M003

Rev: A1