


## 输入/输出端口

定谊科技医疗推车电脑具有一套完整的I/O端口。以下端口位于显示面板的侧缘及下部后边缘。

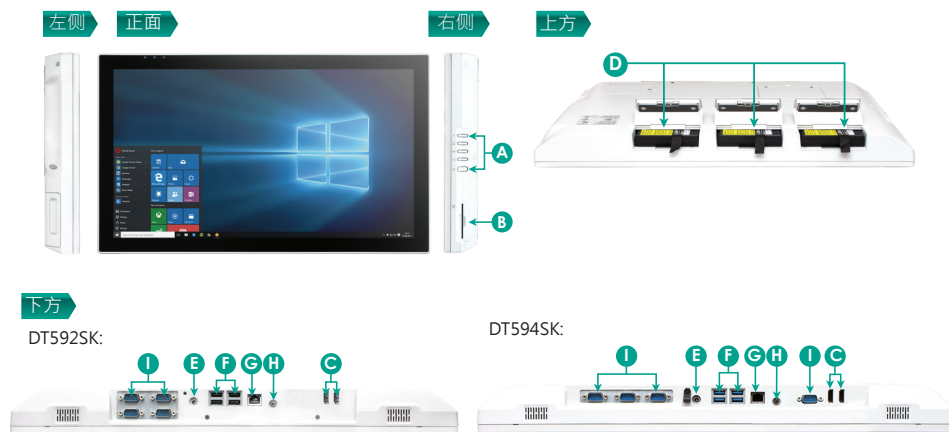

<b>A</b> 侧面板功能按键	<b>D</b> 电池组 (可选)	<b>G</b> 以太网接口 (RJ45)
<b>B</b> 智能卡读卡器 (可选)	<b>E</b> 直流电输入	<b>H</b> 音频端口
<b>C</b> HDMI输出端口	<b>F</b> USB 接口	<b>I</b> COM 端口

**⚠ 电池使用须知:** 若在三个月内不使用机器，请务必定期将电池充放电以激活电池。

定谊科技不建议使用者将电池长期静置而不使用，否则将使锂离子钝化，以至无法正常使用

一般建议使用者于三个月之内一定务必使用过电池。使用条件应如下：

1. 将电池充电到100%
  2. 将电池放电到0%
  3. 再将电池充至40%~50% (若要再静放时，请以40%~50%为标准)
- 若预计会长期静放电池而无任何负载时，请以40%~50%为条件来静放。



MEDICAL – GENERAL MEDICAL EQUIPMENT  
AS TO ELECTRICAL SHOCK, FIRE AND MECHANICAL  
HAZARDS ONLY IN ACCORDANCE WITH ANSI/AAMI  
ES60601-1 (2005) + AMD (2012) & “CAN/CSA-C22.2  
No. 6060-1 (2008) + (2014)

DT Research

医疗推车  
专用电脑

## DT592SK/ DT594SK

### 使用入门

### 简体中文



### 介绍

感谢您购买定谊科技医疗推车

电脑。定谊科技医疗推车电脑拥有22至24寸的TFT显示屏，采用Intel® Core™ i 处理器，实现了高性能和低功耗的完美结合。拥有集成定点照护模块在一个精致且省空间的设计中，定谊科技医疗推车电脑是提高工作流程和服务的最佳解决方案。

请花几分钟的时间仔细阅读本文件的内容，以确保安装和启动的顺利进行。定谊科技医疗推车电脑开箱即可使用，其默认配置所提供的是电源供电。下文中提供了医疗推车电脑在硬件元件和功能上的指导说明。有关软件操作系统或应用软件的信息，请咨询您的设备提供商。

### 包装清单

1. 一台DT592SK或DT594SK
2. 三个DR202锂离子电池 (可选)
3. AC-DC电源适配器含电源线
4. 基本操作手册

DT Research  
www.dtresearch.cn

DT Research, Inc.  
2000 Concourse Drive, San Jose, CA 95131  
Copyright © 2020, DT Research, Inc.

BOG051420 DT59XSK

## 注意事项

- 操作或持有医疗推车电脑时皆须谨慎小心使用。
- 请勿尝试拆卸医疗推车电脑，因为这会导致担保失效。
- 除了随设备提供的 AC-DC 适配器以及从制造商或其合作伙伴那里获得的适配器之外，不要使用任何其他适配器为设备充电或供电。
- 如果出现某些极罕见的情况，例如冒烟、发出异常声音或散发怪味，请立即关闭医疗推车电脑的电源并断开所有电源连接。请立即报告给您的设备提供商。

## 基本特征

定谊科技医疗推车电脑集成了高清22至24寸显示屏，并拥有一系列模块与主要设备搭配，包括定点照护应用的USB端口和可选配件，例如电容式触摸屏，可热插拔的电池和智能卡读卡器，提供全面的医疗保健解决方案。

## 开启和关闭

如果您选购自带电池组的医疗推车电脑，请打开电池槽盖，将电池依次放入。如果没有电池组，请使用医疗推车电脑的AC-DC适配器供电。如要激活医疗推车电脑，请按下电源按钮并随即释放，显示内容将会在几秒钟内出现。如要进入待机模式，请按下电源按钮并随即释放。如果关闭电源，请使用软件操作系统中提供的“关闭计算机”软件功能来安全地关闭设备电源。

### 注意：

随设备交付使用的电池组(可选)可能电力不足。第一次设置医疗推车电脑时请使用 AC-DC 适配器给内置电池组完全充电。您可以将外接电池组连接到医疗推车电脑进行充电，或者使用可选的外接电池充电器充电。

### 注意：

当电池组(可选)正在充电时，蓝色的电池 LED 会缓慢闪烁。如果插入 AC-DC 适配器后没有出现闪烁，并且 LED 不亮，那可能是由于电池组放电过量。请尝试将 AC-DC 适配器与医疗推车电脑断开再重新连接，这样重复几次来激活充电过程。

### 注意：

为保存电力，当您不使用设备时，请用电源按钮（按下随即释放）使设备进入“待机”模式。短暂按下同一按钮可以在几秒钟之内唤醒系统。

### 注意：

请不要使用电源按钮关闭设备（即，按住四秒以上的触发行为）——这种硬件关闭设计用于在设备锁定时进行恢复，而不是作为正常操作。

### 注意：

经由HDMI线连结外部屏幕时，请使用适配器供电。

## 电源/电池指示灯状态

- 蓝色表示电池是25%到100%的充电
- 呈蓝色闪烁表示电池正在充电
- 橙色表示电池电量在11%到25%
- 橙色灯闪烁表示电池电量低于10%



## 无线网络

### 无线局域网

医疗推车电脑标配内置无线模块（包含定制的隐藏天线），支持802.11ac标准以及多种加密方式的用户准入。

- 通过支持典型的 WLAN 适配器，医疗推车电脑能够检测附近区域所有的 802.11 接入点，供您选择使用以建立连接。
- 医疗推车电脑和接入点上的 SSID 及 WEP（如果已启用）参数必须匹配。SSID 区分大小写，并且我们建议您启用 WEP 加密（或其他高级选项）来实现安全访问。
- 在启用 WEP 时，您可能需要咨询网络管理员或查看网络设备文档来正确配置相关的设置（例如身份验证模式等）。
- 请参考接入点操作手册来设置 802.11 接入点。

### 蓝牙

医疗推车电脑 提供内置蓝牙适配器，并按照 Microsoft Windows Bluetooth 协议进行操作。蓝牙配置应用程序可从系统托盘或控制面板调用。请遵照应用程序中提供的说明和选项来配置和触发与相应外设之间的蓝牙连接。

### 注意：

与 Microsoft Windows Bluetooth 协议不兼容的蓝牙设备或附属装置可能无法用于医疗推车电脑。