

使用说明书

OMRON 欧姆龙

体重身体脂肪测量器

V·BODY HBF-358
| 体 重 身 体 脂 肪 测 量 器 |



■本说明书中的插图为效果图。

产品注册号： 苏食药监械（准）字 2009 第 2210219 号

生产许可证号： 2004-0107 号

执行标准： YZB/ 苏 0227-2009

目 录

HBF-358 的使用方法 1

前言

安全注意事项 3

结构组成 7

电源自动关闭 / 操作面板的放置 8

测量前（各种设定）

安装电池 9

设定个人数据（年龄·性别·身高） 10

更改个人数据 12

删除个人数据 13

测量方法和测量结果

测量体重、身体脂肪率、内脏脂肪指数等指标
（使用个人号码键测量 / 使用“客人”键测量） 14

只测量体重 19

如有疑问时·保修

如有疑问时 20

规格 22

保修卡和产品保证书 封底

■ 感谢您购买欧姆龙产品。

■ 为了您安全使用本产品，使用前请务必仔细阅读本使用说明书。

■ 请将本书放在手边使用。

■ 本书附有保修卡，请您妥善保管，以防丢失。

前言

测量前（各种设定）

测量方法和测量结果

如有疑问时·保修

HBF-358 的使用方法


测量前（各种设定）

使用前请做以下准备工作，以便正确测量。




1 接通电源

按下电源开关。

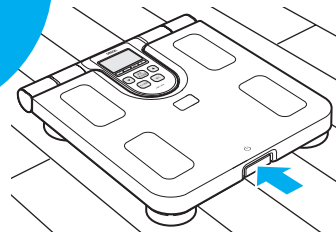

测量准备中

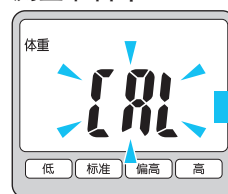


准备 OK



(第 14 页)

2 选择个人号码

用“个人号码”键切换个人号码。

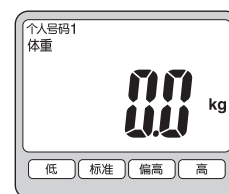

(第 15 页)

身体成分是指

构成身体的肌肉、脂肪和骨骼等组织和水分等。

以下内容将帮助您了解自己的身体脂肪率等指标、进行健康管理。

■ 身体脂肪率

“身体脂肪重量”在体重中所占的比例。可通过（低 / 标准 / 偏高 / 高）的显示来衡量身体脂肪率。

■ 内脏脂肪指数

了解附在内脏周围的脂肪的程度。可通过（标准 / 偏高 / 高）的显示来衡量内脏脂肪程度。

测量方法和测量结果


3

踏上
本体

体重的显示和确定（闪烁）



“开始测量”显示后

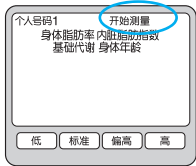

手臂与身体要保
持 90°

测量中...




测量结束（显示体重）




（第 16 页）

4

确认身体
成分指标

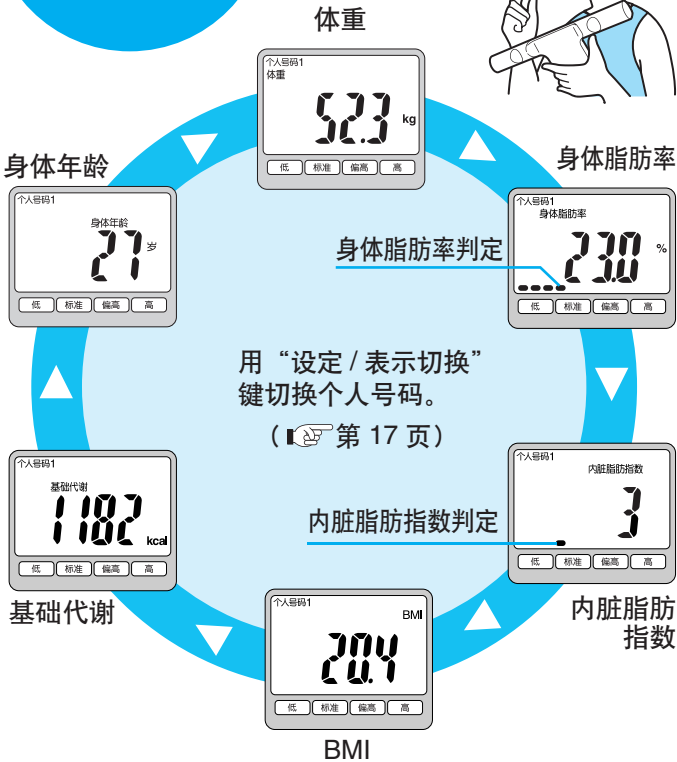

为了帮助您进行健康管
理，请将测量结果记在笔
记本上或图表中。

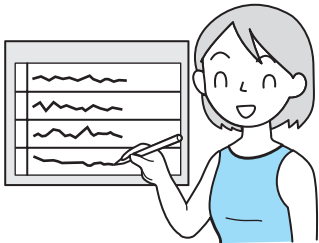

●只测量体重（第 19 页）

BMI

是表示肥胖度的国际标准。理想的 BMI 值是 “22”。

详细说明请参阅附录的“活用指南”。

安全注意事项

使用前请务必仔细阅读。

- 以下内容是为了防止产品在使用过程中对使用者、他人造成伤害或财产损失。
- 标志及其含义如下。

■ 危险、警告、注意的含义

 危险	表示如果操作错误很可能会直接导致人员死亡或重伤。
 警告	表示如果操作错误可能会造成人员死亡或重伤。
 注意	表示如果操作错误可能会造成人员伤害和物品损坏*。

*物品损坏是指房屋、财产以及家畜、宠物相关的损害。

■ 图标含义

 强制	● 标记表示强制（必须遵守的）事项。具体的强制内容会在●中或旁边以文字或图形的形式标明。左图表示“一般性强制”的情况。
 禁止	⊘ 标记表示禁止（不允许的）事项。具体的禁止内容会在⊘中或旁边以文字或图形的形式标明。左图表示“一般性禁止”的情况。
 10	♻ 符号是电子信息产品污染控制标志。 表示本产品的环保使用期限为10年，并且可以回收利用，不应随意丢弃。 不包括干电池。


危险

使用时

绝对不能与以下医疗电子仪器一起使用。

- ① 心脏起搏器等植入式医疗电子仪器
- ② 人工心脏等用来维持生命的医疗电子仪器
- ③ 心电图机等佩戴式医疗电子仪器

- 如果与上述医疗电子仪器一起使用会导致其误动作，可能会危及生命。

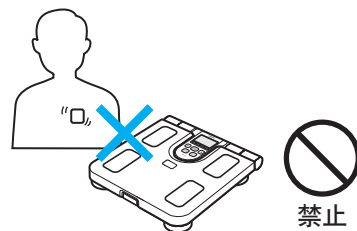

警告

使用时

想减肥或实施运动疗法时，请务必寻求医生或专业人员的指导，不要自行判断。

- 如果自行判断可能会对健康造成伤害。



产品适用范围


本产品适用于人体体重、BMI 值、身体脂肪率和内脏脂肪指数的测量。

警告

关于安装和使用

请勿在瓷砖或湿的地面等容易滑倒的地方使用。

- 否则测量者可能会滑倒摔伤。

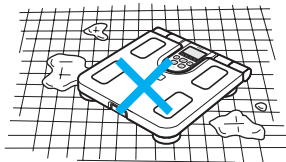

关于测量


残疾人必须在他人帮助下使用。

- 否则可能会滑倒。测量时请一定注意。



请勿在沐浴后等身体或手淋湿的情况下测量。

- 否则测量者可能会滑倒摔伤。
- 否则机器内部会进水，从而引起故障。而且也无法测出正确的身体脂肪率

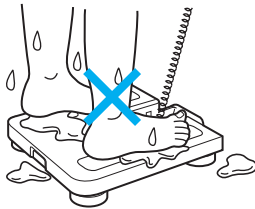

请勿跳上本体或在本体上跳跃。

- 否则可能会滑倒摔伤。另外，如果冲击超过使用范围会造成损坏。



请勿站在本体边缘或操作面板上。

- 否则可能会滑倒摔伤。而且可能无法正确测量。



关于电池的使用

万一电池液不小心溅到眼睛里，请立即用大量清水冲洗。

- 可能会导致失明，请立即就医。




注意

使用时


请勿在专业用途上使用（例如，在医院使用等）。

- 符合家用测量仪器标准的机器，不具备专业用途所需要的功能。

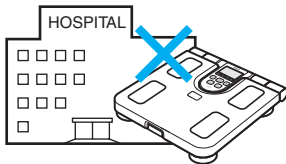

请勿在操作面板或本体附近使用手机。

- 否则可能会出现异常。

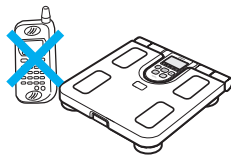


安全注意事项

⚠ 注意

关于安装和使用

请勿对操作面板以及本体进行拆解、修理或改造。

- 否则可能会受伤或导致故障发生。

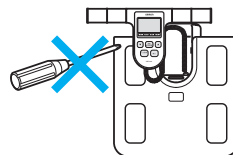

禁止

请在踏上本体之前取出操作面板。

- 如果站在本体上取出操作面板，会因失去平衡而滑倒导致受伤。



禁止

将操作面板放入本体时，请不要将手放在手柄电极金属部位的内侧。

- 否则可能会夹伤手指。




禁止

关于测量

请光脚测量。

- 否则测量者可能会滑倒摔伤。而且也无法测出正确的身体脂肪率等指标。

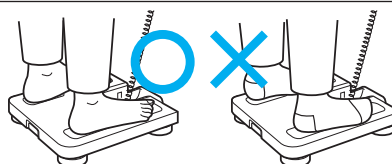

强制

关于电池的使用

如果电池液不小心溅到皮肤或衣服上，请立即用大量清水冲洗。

- 电池液可能会腐蚀皮肤或衣服。



强制

请勿颠倒电池的正 ⊕ ⊖ 负极。

电池电量用尽后立即取出，并同时更换 4 节新电池。

长时间不使用（3 个月以上）时要取出电池。

- 否则可能会发生漏液、发热、破裂等情况，对人员造成伤害。



强制

请勿同时混用新旧电池或不同型号的电池。

- 否则可能会发生漏液、发热、破裂等情况，对人员造成伤害。



禁止

请勿将电池加热或投入火中。

- 否则可能会发生破裂造成伤害。



禁止

关于保管

请放在婴幼儿无法触及的地方保管。

- 否则会因线缆缠绕或掉落而造成伤害。



强制

注 意 事 项

■ 安装的注意事项

请勿放在潮湿、有水、日光直射、空调风可直接吹到的地方、烟火附近。

- 否则可能会发生故障。

请勿在草垫或地毯等柔软的地面上使用。

- 否则可能无法正确测量。

■ 使用的注意事项

如果与脚部患有皮肤病等感染性疾病的人士共用本机器，请清洁后再使用。

- 否则可能会引起感染。如果共用本机器，请用软布沾上水或者中性洗涤剂，用力拧干后擦拭，然后用软布擦干。

请勿用于测量体重、身体脂肪率、内脏脂肪指数等指标以外的用途。

不要强行拉拽连接本体和操作面板的线缆。


- 否则线缆可能会脱落引起故障。

本产品属于精密仪器，请勿掉落、振动或撞击。

- 否则可能会发生故障。

请勿手持操作面板进行搬运。

- 否则可能会发生故障。

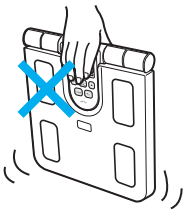

■ 日常维护的注意事项

请保持本体清洁。

- 本体上的污垢可以用柔软的干布擦除。
- 如果污垢较严重，请用软布沾上水或者中性洗涤剂，用力拧干后擦拭，然后用软布擦干。

请勿用水冲洗操作面板或本体。

- 否则可能会发生故障。

请勿使用挥发剂、稀释剂、汽油等去除污垢。

- 否则可能会发生变色或故障。



■ 保管注意事项


请勿保管在以下地方。

- 有水的地方
- 受高温、潮湿、日光直射、灰尘、含盐分的空气影响的地方
- 存在倾斜、振动、冲击的地方
- 保管化学药品或存在腐蚀性气体的地方

使用注意事项

1. 以下人员可能无法正确测量身体脂肪等指标：成长期儿童 / 65 岁以上的老年人 / 闭经后女性 / 因感冒等原因发烧的患者 / 孕妇 / 骨密度非常低的骨质疏松患者 / 浮肿症患者 / 人工透析患者 / 以健身或运动为职业的人士。
2. 该产品无法测量未满 10 岁或 81 岁以上人员的身体脂肪等指标。
3. 该产品无法显示未满 18 岁使用者的内脏脂肪指数。
4. 该产品只能用于家庭测量。
5. 使用时不能和以下医疗电子仪器一起使用：
 - (1) 心脏起搏器等植入式医疗电子仪器
 - (2) 人工心脏等用来维持生命的医疗电子仪器
 - (3) 心电图机等佩戴式医疗电子仪器
6. 想减肥或实施运动疗法的人，务必寻求医生或专业人士指导，不要自行判定。

结构组成

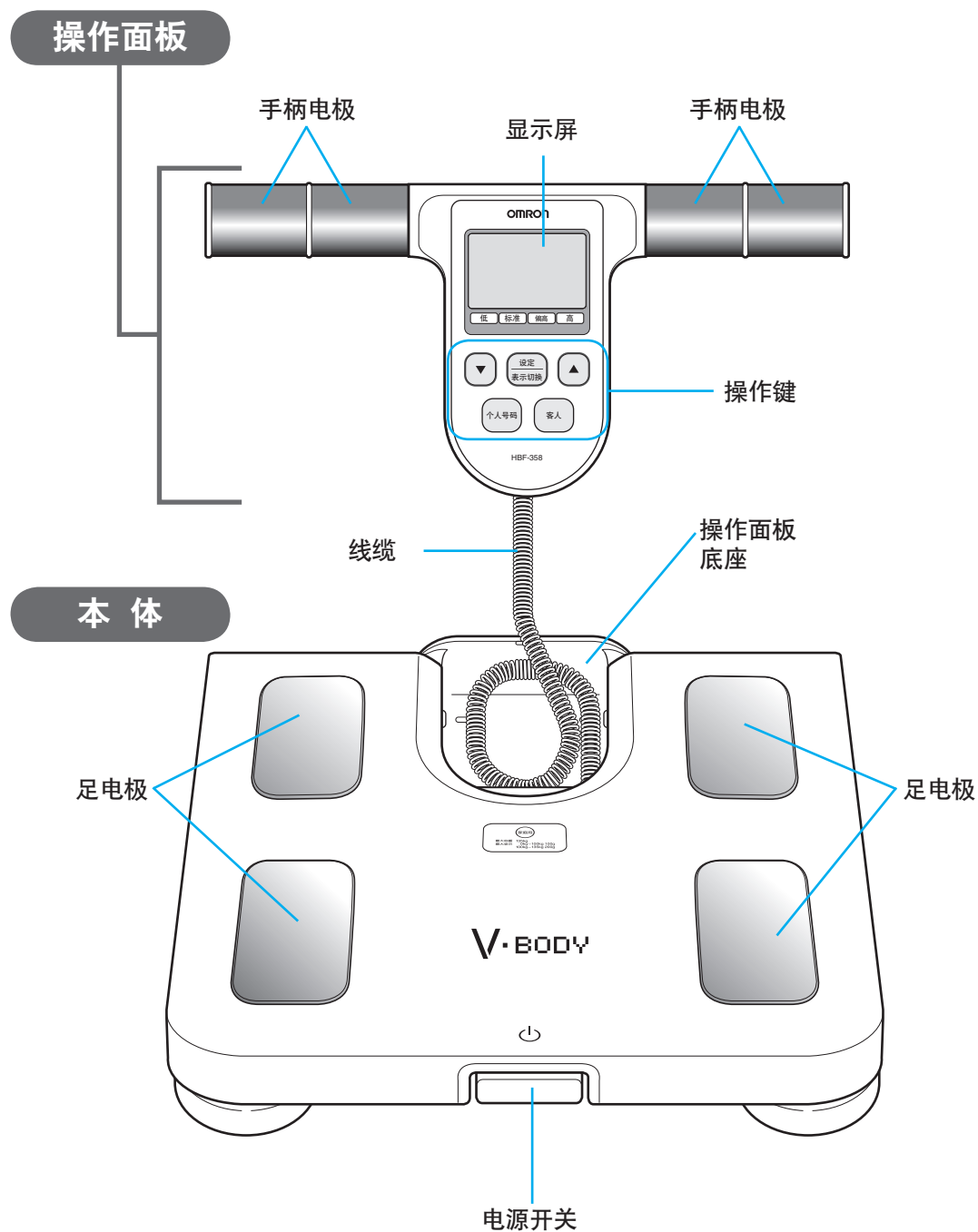

电源自动关闭 / 操作面板的放置


关于电源的自动关闭

以下情况电源将自动关闭。

- 显示“0.0 kg”时，在大约 1 分钟内未做任何操作
- 设定个人数据时，在大约 5 分钟内未做任何操作
- 显示“开始测量”或测量结果时，在大约 5 分钟内未做任何操作


操作面板的放置方法

- 如果拿起操作面板，则线缆展开。
请按照如下方法放置操作面板。

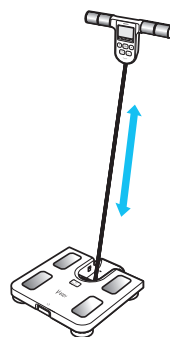


1 将线缆收藏到本体操作面板的底座内

※按照底座深度卷起线缆
并放入，不要让线缆
露出。

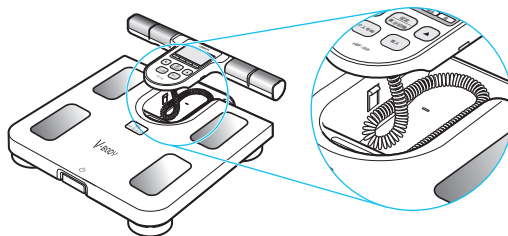

2 轻按操作面板将其嵌入本体

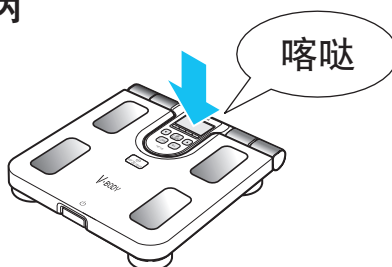


安装电池


装入 4 节随机附带的 5 号锰干电池。

1 将本体翻过来， 打开电池盖

- ① 沿箭头方向按下电池盖的锁扣
- ② 向上提起电池盖的锁扣，打开电池盖

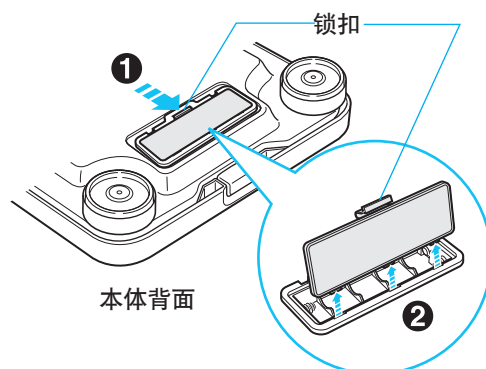

2 将电池按照图中所示的位置正确放入 带有弹簧的一侧为 ⊖。

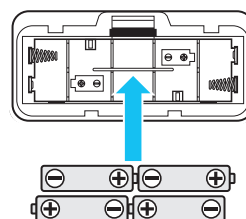

3 关闭电池盖

关于电池的寿命和更换

■ 大约可以使用 1 年。(使用 5 号锰干电池<黑> (4 节)，室温 23℃，1 天测量 4 次的情况下)

※ 随机附带的是试用电池，电量可能会在 1 年内耗尽。


■  如果图标单独点亮，表示电量耗尽。
请同时更换 4 节新电池 (相同型号)。

■ 请在关闭本体电源后更换电池。

※ 更换电池时，个人数据会被保留。

※ 使用后的干电池的废弃方法请按照城市环境保护的相关规定处理。

电池更换
图标

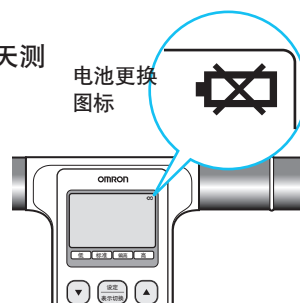

设定个人数据 (年龄・性别・身高)



测量体重、身体脂肪率、内脏脂肪指数等指标之前需要先录入“年龄・性别・身高”。
可以录入多达 4 个人的数据。

※没有录入过个人数据的人士，也可以利用“客人”功能测量体重、身体脂肪率、内脏脂肪指数等指标。
( 第 15 页)

1 在操作面板置于本体内的状态下， 按电源开关

显示屏的“CAL”闪烁后，会显示出“0.0 kg”。


※在“0.0 kg”显示之前请勿触摸、移动本体或抬起操作面板，否则显示“Err”（错误）。( 第 20 页)

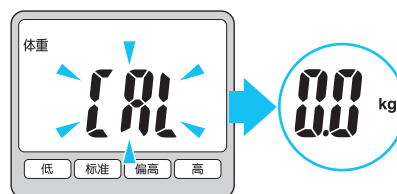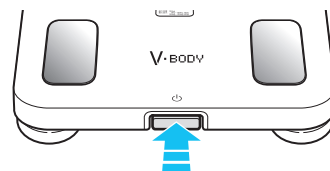

2 按“个人号码”键， 选择要设定的个人号码


每按 1 次显示下一个“个人号码”。

※最多可设定 4 人 (1~4)。

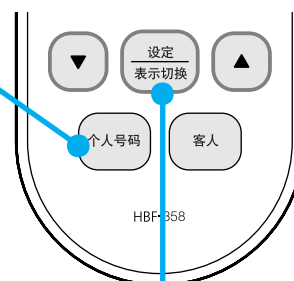

3 按“设定 / 表示切换”键， 确定“个人号码”

“年龄”闪烁。

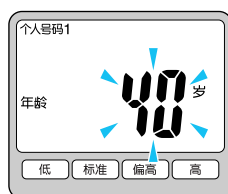

前言

测量前 (各种设定)

测量方法和测量结果


如有疑问时・保修

接下一页

10

4 按“▼” / “▲” 任一按键， 设定“年龄”

※设置范围为 10 ~ 80 岁。

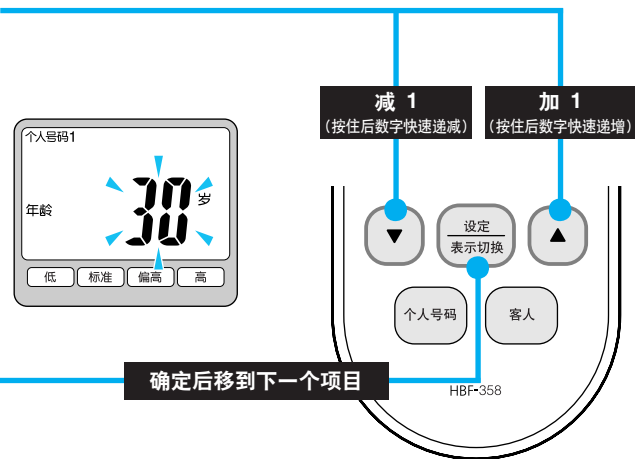

5 按“设定 / 表示切换”键， 确定“年龄”

“性别” 闪烁。



所设置的年龄无法自动更新，所以请在每年的生日后更新所设定的年龄。
若年龄设置不正确，可能无法正确测量。

6 步骤 4、5 同样方法设置“性别”“身高”

※“性别” 的设置为“男”“女”，“身高” 的设置范围为 100.0 cm ~ 199.5 cm。

确定身高，所设置的“年龄・性别・身高” 都显示出来之后，将会显示“0.0 kg”。

※如果是“客人” 身份设置身高，设置后将直接开始测量。（第 16 页）

至此，设定操作完毕。

※可接着测量体重、身体脂肪率、内脏脂肪指数等指标。（第 16 页）

7 按下本体的电源，关闭电源。

■ 以下情况无法设定。请重新设定个人数据。

- 设置过程中超过 5 分钟未进行任何操作，电源自动关闭时
- 设置过程中电源关闭时



设定个人数据（年龄・性别・身高）

更改个人数据

1 在操作面板置于本体内的状态下， 按电源开关

显示屏的“CAL”闪烁后，会显示出“0.0 kg”。

※在“0.0 kg”显示之前请勿触摸、移动本体或抬起操作面板，否则显示“Err”（错误）。


( 第 20 页)

2 按“个人号码”键，选择要更改的个人号码

每按 1 次显示下一个“个人号码”。



3 按“设定 / 表示切换”键， 选择要更改的项目（年龄・性别・身高）

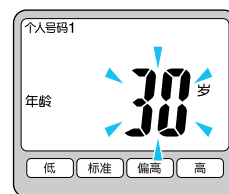

4 按“▼” / “▲”键更改， 按“设定 / 表示切换”键确定，

确定身高，所设置的“年龄・性别・身高”都显示出来之后，将会显示“0.0 kg”。

至此，个人数据的更改操作完毕。

※可接着测量体重、身体脂肪率、内脏脂肪指数等指标。( 第 16 页)

5 按下本体的电源，关闭电源

前言

测量前（各种设定）

测量方法和测量结果

如有疑问时・保修

删除个人数据

1 在操作面板置于本体内的状态下， 按电源开关

显示屏的“CAL”闪烁后，会显示出“0.0 kg”。

※在“0.0 kg”显示之前请勿触摸、移动本体或抬起操作面板，否则显示“Err”（错误）。

( 第 20 页)


2 按“个人号码”键，选择要删除的个人号码

每按 1 次显示下一个“个人号码”。



3 按“设定 / 表示切换”键， 确定要删除的个人号码


“年龄”闪烁。

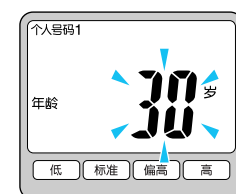

4 按住“客人”键 2 秒钟以上 删除个人数据

显示屏上的“Clr” (= clear / 清除) 点亮。

“Clr”熄灭后，个人数据即被删除。

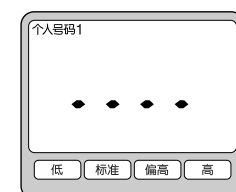

至此，个人数据删除完毕。

5 按下本体的电源，关闭电源。

测量体重、身体脂肪率、内脏脂肪指数等指标

(使用个人号码键测量 / 使用客人键测量)

如果使用个人号码键测量，需要预先录入个人数据。(▶ 第 10 页)

※如果没有录入个人数据，可以使用“客人”键测量。

■ 请在平坦坚硬的地面上测量。



※在垫子或地毯等柔软的地面上无法正确测量。

1 在操作面板置于本体内的状态下， 按电源开关

显示屏的“CAL”闪烁后，会显示出“0.0 kg”。

※“CAL” (= calibration / 校准) 闪烁时，表示本体正在进行正确测量前的准备。


接通电源后，在“0.0 kg”显示前，请勿踏上本体或移动本体，也不要在本体上放置物件。即使未显示“Err” (错误)，也可能无法正确测量体重、身体脂肪率、内脏脂肪指数等指标。

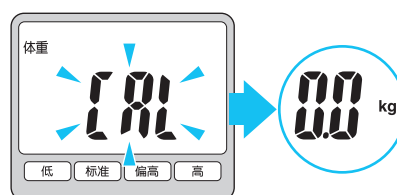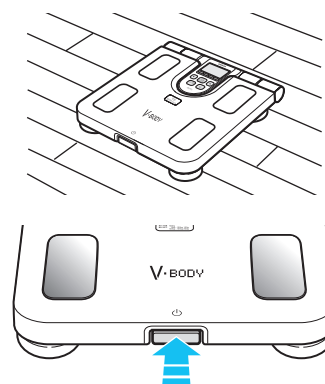

请勿踏在本体上。


2 取出操作面板

※在“0.0 kg”显示前请勿触及操作面板。

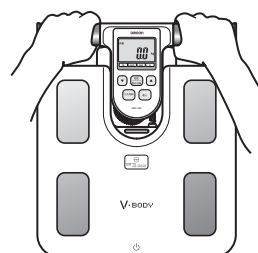


手柄电极的握法


手掌要紧贴电极

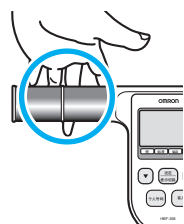

将中指放在手柄电极背面的
凹陷部

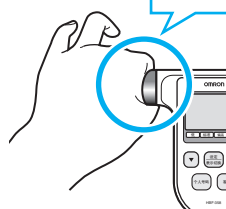

拇指和食指握住
内侧的手柄电极

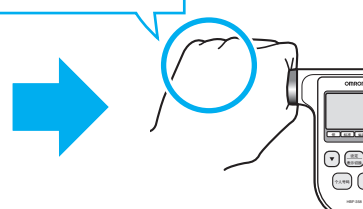

用无名指和小指握住
外侧的手柄电极

接下一页



14

3

已设定个人数据者

按“个人号码”键，
选择自己的个人号码


每按 1 次显示下一个“个人号码”。

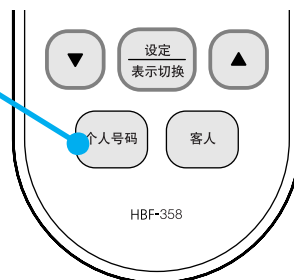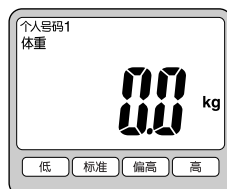

当出现右边画面时…

所选中的个人号码下没有个人数据。请先录入个人数据。

(☞ 第 10 页)

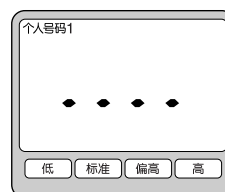



以客人身份测量者

什么是“客人”功能？

预先没有录入个人数据的使用者，可以通过临时输入“年龄・性别・身高”的方式测量体重、身体脂肪率、内脏脂肪指数等指标。

1 按“客人”键

“客人”显示，
“年龄”闪烁。

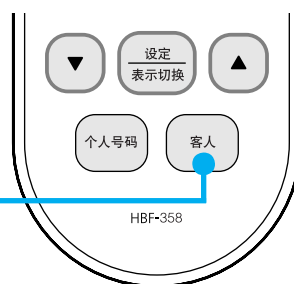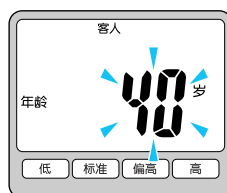


2 设定个人数据（年龄・性别・身高）

请参阅“设定个人数据（年龄・性别・身高）”中的步骤 4 ~ 6。

(☞ 第 11 页)

4 测量

1 踏上本体


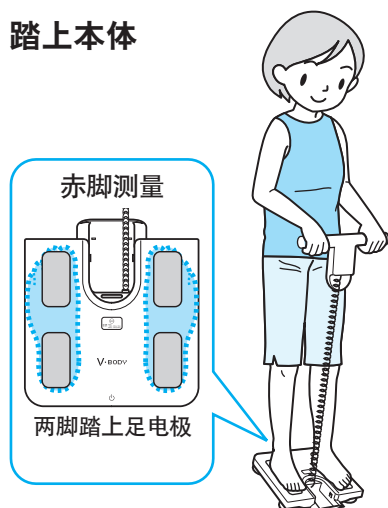


※请光脚测量。如果穿着袜子站在上面，将无法正确测量。


确定体重。

※闪烁2次后表示体重已经确定。

然后测量身体脂肪率和内脏脂肪指数等指标。

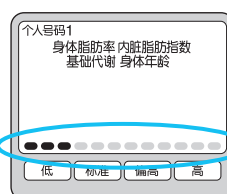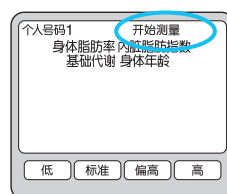

2 出现“开始测量”后，将手臂和身体成 90°

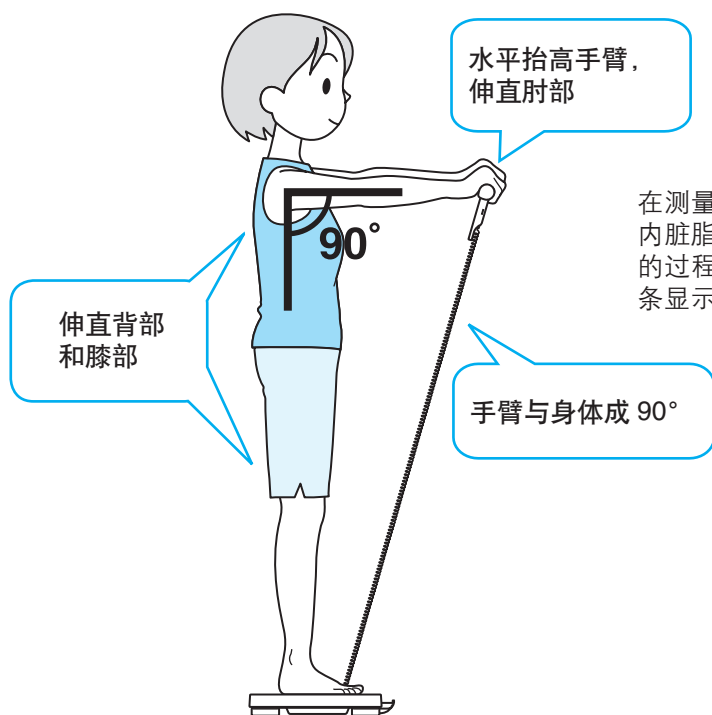

在测量身体脂肪率和内脏脂肪指数等指标的过程中，通过进度条显示进行情况。

前言

测量前（各种设定）

测量方法和测量结果

如有疑问时·保修




测量体重、身体脂肪率、内脏脂肪指数等指标（使用个人号码键测量 / 使用客人键测量）


错误的姿势！




身体摇晃

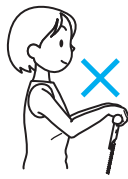


手臂弯曲

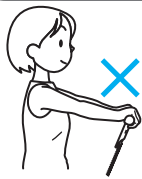

手臂低垂（或
过度上举）

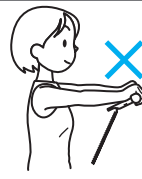

操作面板
朝向上方

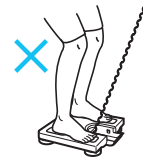

膝部弯曲




脚底偏离电
极

3 测量结果（体重）显示后，从本体上下来


5 确认测量结果

每按 1 次“设定 / 表示切换”键显示内容切换。

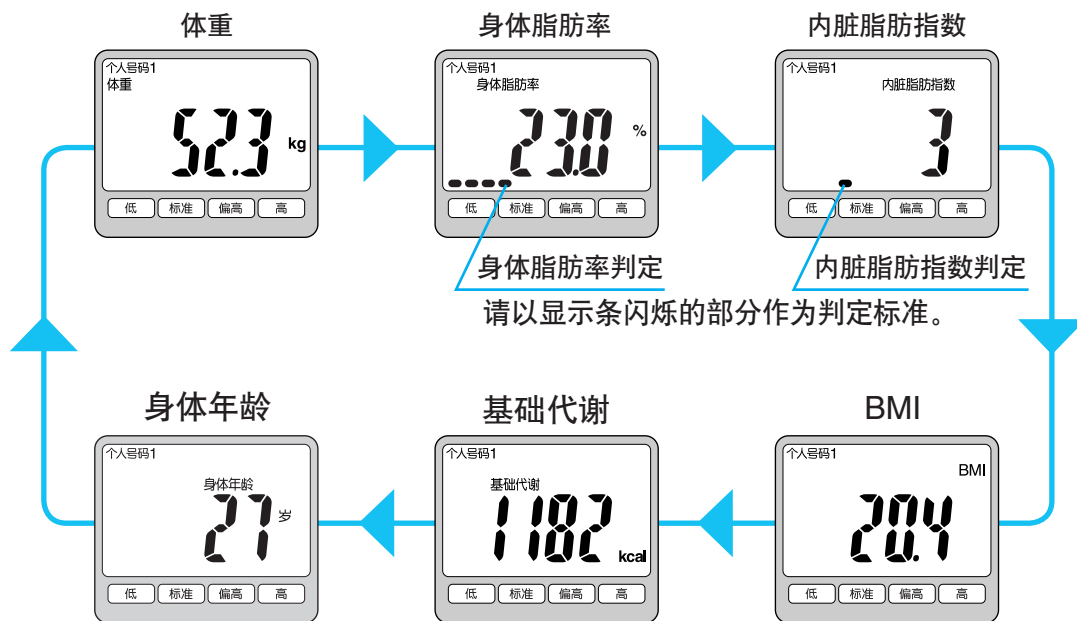

有关身体脂肪等方面的说明…（ 第 1~2 页）
请参阅附录的“活用指南”。

※ 9 岁以下 81 以上：无法测量身体脂肪率等指标。
17 岁以下：无法显示内脏脂肪指数以及身体年龄。

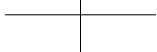

测量体重、身体脂肪率、内脏脂肪指数等指标（使用个人号码键测量 / 使用客人键测量）

■ 身体脂肪率的判定方法

低 标准 偏高 高	低 标准 偏高 高	低 标准 偏高 高	低 标准 偏高 高
低 标准 偏高 高	低 标准 偏高 高	低 标准 偏高 高	低 标准 偏高 高
低 标准 偏高 高	低 标准 偏高 高	低 标准 偏高 高	低 标准 偏高 高
低	标准	偏高	高

身体脂肪率是将“低”、“标准”、“偏高”、“高”的每个判定标准分成3段，也就是共计分成12段来表示。请将柱状显示条闪烁的部分作为判定的标准。

■ 内脏脂肪指数的判定方法

低 标准 偏高 高	低 标准 偏高 高	低 标准 偏高 高
低 标准 偏高 高	低 标准 偏高 高	低 标准 偏高 高
低 标准 偏高 高	低 标准 偏高 高	低 标准 偏高 高
标准	偏高	高

内脏脂肪指数是将“标准”、“偏高”、“高”的每个判定标准分成3段，也就是共计分成9段来表示。内脏脂肪指数判定中没有“低”这一项。请将柱状显示条闪烁的部分作为判定的标准。

※本产品无法测量未满10岁和81岁以上人员的身体脂肪等指标。

无法显示未满18岁人员的内脏脂肪指数。

本产品是利用测量出的体重和电阻值，与身高、年龄、性别组成计算公式计算出身体脂肪率和内脏脂肪指数，本测量结果仅供参考，如有异常，请向专业医师咨询。

6 按下本体的电源，关闭电源。

※请将操作面板放入本体中。（ 第8页）

只测量体重

请直接测量，不必将操作面板从底座中取出

※只测量体重时不必设定个人数据。

■ 请在平坦坚硬的地面上测量。




※在垫子或地毯等柔软的地面上无法正确测量。

1 在操作面板置于本体内的状态下， 按电源开关


显示屏的“CAL”闪烁后，会显示出“0.0 kg”。

※“CAL”（= calibration / 校准）闪烁时，表示本体正在进行正确测量前的准备。

接通电源后，在“0.0 kg”显示前，请勿踏上本体或移动本体，也不要在本体上放置物件，不要取出操作面板。
即使未显示“Err”（错误），也可能无法正确测量体重。

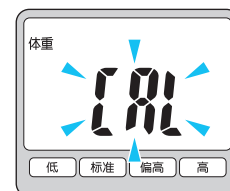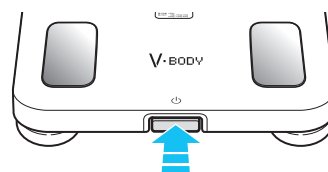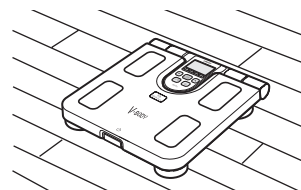

请勿踏上本体上

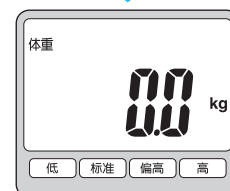

可踏上本体

2 踏上本体



3 确认测量结果

闪烁 2 次后表示体重已经确定。

※也可以取出操作面板确认测量结果。



4 从本体上下来，按下本体的电源，关闭电源。



如有疑问时

■ 出现错误提示信息图示

错误提示信息	原因	对策
Err 1	手掌或脚底没有贴紧电极	测量时请将手掌或脚底贴紧电极 ( 第 14~17 页)
Err 2	测量姿势不正确，手掌和脚底没有贴紧电极	测量时请勿移动手脚 ( 第 14~17 页)
Err 3	手掌和脚底过于干燥	测量前请用湿毛巾等稍微将手掌和脚底擦湿
Err 4	体重、身体脂肪率、内脏脂肪指数等指标超出了测量范围	请确认设置的“年龄・性别・身高”是否有误 ( 第 12 页) 即使“年龄・性别・身高”的设置正确，如果不在测量范围内也无法测量
Err 5	运行异常	请重新安装电池后测量 如果仍旧出现错误提示，请与欧姆龙健康咨询室联系 ( 封底)
Err	在“0.0 kg”显示前就踏上本体	重新接通电源，在显示“0.0 kg”之后再踏上本体。
	在“0.0 kg”显示前移动了本体	重新接通电源，在显示“0.0 kg”之前请勿移动本体。
	在测量过程中移动了本体	测量过程中请勿移动本体
	测量时，超出体重测量范围	体重超过 135 kg 的人员请勿使用

前言

测量前（各种设定）

测量方法和测量结果

如有疑问时・保修

如有疑问时

■ 测量值异常、运行异常

现象	原因	对策
踏上主体，显示“0.0 kg”，或者 体重值几乎没有增加	在“0.0 kg”显示前就踏上本体	请在“0.0 kg”显示后再踏上本体
显示的体重值异常偏高或偏低		
测量值异常偏高或偏低 每次的测量值都相差很大	在地毯等柔软的地面或凹凸不平的地面上测量	请在平坦坚硬的地面上测量
	手掌、脚底以及身体过凉，血液循环不通畅	通过焐热等方法使血液循环恢复到正常状态后再进行测量
	电极过凉	先在温暖的室内放置一段时间，待电极温暖后再进行测量
	手掌和脚底过于干燥	测量前请用湿毛巾等稍微将手掌和脚底擦湿
	请同时参阅附录“活用指南”中的“正确测量前的准备工作”（  第 9 页）	
打开电源后无任何显示	未安装电池	请安装电池（  第 9 页）
	电池的放置方向错误	请按照正确方向放置电池（  第 9 页）
	电池电量耗尽	请安装电池（  第 9 页）
	连接本体和操作面板的线缆破损	请与欧姆龙健康咨询室联系（  封底）
要测量身体脂肪率等指标时，在体重值确定后，无法开始测量身体脂肪率等指标	未设定个人号码或“客人”数据（显示部分没有显示个人号码“1”“2”“3”“4”或“客人”）	请设定个人号码或“客人”数据后再测量。（  第 10 页）
未做任何操作电源被关闭	请参照“电源自动关闭”（  第 8 页）	

※尽管采取以上措施但仍无法正常测量时则为故障。有关产品故障以及维修事项请与欧姆龙健康咨询室联系。

（封底）

※虽然非常少有，但也存在由于人体体质上的差异导致无法测量的情况。这种情况也请与欧姆龙健康咨询室联系。

（封底）

※本产品发生故障或进行维修时，其中的所有个人数据将会丢失。

规格

产 品 名 称	欧姆龙体重身体脂肪测量器 V-BODY HBF-358 (HBF-904-SH)		
显 示 *	体重最小显示	0~100 kg	: 100 g 单位
		100~135 kg	: 200 g 单位
	身体脂肪率	5.0~50.0%	: 0.1%单位
	内脏脂肪指数※	1~30	: 1 个指标单位
	BMI	2.5~90.0	: 0.1 单位
	身体脂肪率判定	低 / 标准 / 偏高 / 高	
	内脏脂肪指数判定※	标准 / 偏高 / 高	
设 置 项 目	设定个人数据 [以下设定项目可以设定 4 个人的数据。]		
	年龄	10~80 岁	: 1 岁单位
	性别	男 / 女	
	身高	100.0 ~ 199.5cm	: 0.5cm 单位
	※使用“客人”功能测量时，每次测量都需要设定个人数据。		
体 重 计 精 度	< 80 kg 时，不大于 1 % ≥ 80 kg 时，不大于 2 %		
电 源	4 节 5 号锰干电池（R6） [也可以使用 5 号碱性干电池（LR6）]		
电 池 寿 命	约 1 年（使用 5 号锰干电池（黑）、室温 23℃，1 天测量 4 次）		
使 用 环 境 温 湿 度	温度为 +5℃ ~ +35℃，相对湿度为 30% ~ 85% RH		
保 存 环 境 温 湿 度	温度为 -20℃ ~ +60℃，相对湿度为 10% ~ 95% RH，通风良好、干燥的室内，周围空气中应无腐蚀性气体		
运 行 大 气 压 强	860hPa ~ 1060hPa		
运输和保存大气压强	500hPa ~ 1060hPa		
重 量	约 2.1 kg（包括电池）		
外 形 尺 寸	操作面板	宽 约 300× 高 约 35× 厚 约 147 mm	
	本体	宽 约 303× 高 约 55× 厚 约 327 mm	
附 件	试用电池（4 节 5 号锰干电池）、 使用说明书（附欧姆龙健康产品保证书）、顾客服务一览表、活用指南、 合格证、有毒有害物质含有表		

上述规格若有变更恕不另行通知。

* 本产品无法测量 9 岁以下以及 81 岁以上人员的身体脂肪率等指标。
本产品无法显示 17 岁以下使用者的身体年龄。

关于体重计的精度

- 本体重计出厂前经过严格检查。有关本商品的厂家保证精度, 请参阅上表的体重计精度栏的说明。
- 本体重计是专为测量体重而制造的测量工具, 不能在物品的买卖交易或证明物品重量是否正确时使用。

家庭用

前言

测量前 (各种设定)

测量方法和测量结果

如有疑问时·保修

欧姆龙健康产品保证书

1. 欧姆龙健康产品从购买之日起，凭购物发票享受一年的免费保修。
2. 我方对因下列使用者个人的原因而造成的故障将不提供免费保修服务。
如：
 - a) 擅自拆装、改装该产品而造成的故障；
 - b) 在使用、搬运的过程中不慎跌落而造成的故障；
 - c) 因缺乏合理的保养而造成的故障；
 - d) 没有按照使用说明书的正确指示进行操作而造成的故障；
 - e) 因非欧姆龙授权的维修店的不当修理而造成的故障等等。
3. 保修范围外的修理服务，将按规定收费。
4. 在要求提供保修服务时，请垂询健康咨询室。
5. 在进行保修服务时，如有需要，可向由我方认定的合格技术人员提供产品电路图和可修理的元器件资料。

保 修 卡

产品型号：_____ 姓名：_____

购买日期：_____ 地址：_____

销售店名：_____ 邮政编码：_____

地址：_____ 电话号码：_____

销售店的印章 _____

销 售 商

电话：0411-87317201
邮编：116600
欧姆龙工贸（大连）有限公司
大连保税区IC-45-1号

售后服务单位

电话：0411-87317201
邮编：116600
欧姆龙工贸（大连）有限公司
大连保税区IC-45-1号

制 造 商

电话：0514-87961819
邮编：225009
可瑞尔科技（扬州）有限公司
扬州市经济开发区兴扬路28号（生产地址及注册地址）

OMRON 健康咨询室



上海：021-63917557
广州：020-87322115
沈阳：024-23258910
武汉：027-82656656
北京：025-86893941
西安：029-87203267
哈尔滨：0451-53009752
昆明：0871-3571933
石家庄：0311-86918693
长沙：0731-4462578

北京：010-85809160
成都：028-86528209
济南：0531-86065603
福州：0591-87674829
天津：022-24152575
杭州：0571-85775948
重庆：023-63726722
深圳：0755-83665528
南宁：0371-67717881
西安：0771-5879402

本产品为欧姆龙工贸（大连）有限公司授权可瑞尔科技（扬州）有限公司生产并注册

5320516-4B



欧姆龙中国医疗健康事业网址：www.omronhealthcare.com.cn