


电子体温计

型号：DT系列

电子体温计能快速准确地测量人体温度，与传统的水银玻璃棒体温计相比，具有读数方便、测量时间短，测量精度高、能记忆并有蜂鸣提示等优点，尤其是电子体温计不含水银，对人体及周围环境无害，特别适合于家庭、医院等场所使用。

技术参数

操作环境：(-5~35)℃，≤80%RH
功 耗：工作状态下为0.15毫瓦
电 池：LR/SR-41型1.5V普通纽扣电池
电池寿命：体温计连续约工作100小时
测量时间：以口腔测量计算，快速型26秒左右，非快速型60秒左右
蜂鸣提示：测量结束后发出5秒钟的蜂鸣提示声
防水性：除防水型外，体温计不具全防水功能
贮存条件：(-25~55)℃，95%RH
生理效应：本产品在使用过程中，对人体无毒、无刺激、无致敏等不良反应。
注：如因规格或外观之改良而有变更时，恕不预告

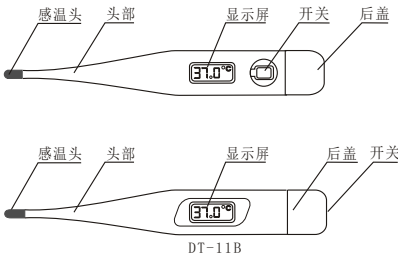


型号说明

项 目	DT-01A(不防水) DT-01B(不防水) DT-01D(不防水)	DT-11A(防水型) DT-11B(防水型) DT-11D(防水型)	DT-K01A(不防水) DT-K11A(防水型) DT-K101A(不防水) DT-K111A(防水型)	DT-02(不防水) DT-12(防水型)	DT-101A(不防水) DT-111A(防水型) DT-111B(防水型)
测量范围	35.5℃~42.0℃	35.5℃~42.0℃	35.5℃~42.0℃	35.50℃~43.00℃	35.5℃~42.0℃
精 度	±0.1℃	±0.1℃	±0.1℃	±0.05℃	±0.1℃
快 速 型	否	否	是	否	否
可弯曲型	否	否	是(DT-K101A,DT-K111A) 否(DT-K01A,DT-K11A)	否	是

使用方法

- 体温计使用前，应先用酒精对体温计头部进行消毒。
 - 按压开关，蜂鸣器马上发出蜂鸣音，显示器如图A所示，时间约2秒钟。
 - 然后显示器显示上次测量的温度如图B（假如上次测量为37.0℃），并持续2秒钟左右。然后显示器显示如C图所示，“℃”符号闪烁，表示体温计已处于待测状态。（如此时室温高于32℃，体温计将显示室温而不显示如C图所示，同时“℃”符号不断闪烁）
 - 将体温计用来量体温。量体温时显示出的温度值逐渐上升，同时“℃”符号不断闪烁。
 - 当测量结束时，“℃”符号停止闪烁，同时体温计发出约5秒钟蜂鸣提示声，这时体温计测量完毕，可以读取显示出的体温值。
- 注：“℃”符号闪烁停止后，如果体温计依然于被测部位相接触，温度值很有可能还在上升。建议在蜂鸣提示以后，尽可能再多测量一些时间。
- 体温计具有自动关机功能，将在测量结束后10分钟内自动关机。但为延长电池寿命，建议使用者在测量结束后，按压电源键关闭电源。

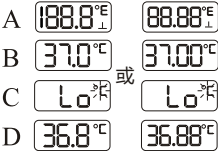

体温测量方法

测量体温时，请保持在同一部位进行一定时间的测量。


- 口腔测量法：测量前，请不要喝热的或冷的饮料，嘴巴闭上5分钟左右，再把体温计的感温头置于舌下内侧根部，和舌头密接后，紧闭嘴巴。
- 腋下测量法：测量之前，先把腋下的汗擦干，腋窝紧闭5分钟左右，再把体温计的感温头由下往上紧顶在腋窝处，交插双臂，使它紧紧密接。(建议将测量结果加0.5℃)
- 直肠测量法：将体温计感温头轻轻插入肛门约1/2英寸(1.3cm)(建议将测量结果减0.5℃)

注意事项

- 请勿摔打和弯曲体温计（软胶型的头部可以弯曲）。
- 除防水型的以外，请勿将体温计浸没于水中，体温计的液晶显示屏和电池盖部分是不防水的。体温计的消毒应采用医用酒精或一次性塑料薄膜套，不能用高温消毒。
- 请勿让体温计接触化学溶剂或稀释剂。
- 请勿让阳光直射体温计。
- 除了更换电池，请勿拆卸体温计。
- 安全性检查：按下开关，体温计发出蜂鸣音，同时显示器显示如图A则表示正常，否则为不正常。
- 保养：每次使用完毕，请将体温计擦拭干燥放入透明外壳中，待下次使用。
- 周期检定：体温计在出厂时已经校准，正常使用情况下无需再校准。如对此有疑问，请三年一次到当地计量监督部门进行校验。

更换电池

- 当体温计温度显示变得黯淡与模糊或不显示时，需更换体温计电池。
 - 按F图所示，打开电池盖用牙签按G图所示将电池取出。
 - 换上一个LR/SR-41型1.5V普通纽扣电池。
 - 如体温计长期不用，请将电池取出。
- 注意：装电池时请留心电池的电极，正极“+”向上，负极“-”向下（DT-11A，DT-12相反）。
- 切记：吞食电池会有生命危险！勿将电池投入火中，否则会引起爆炸。请将电池放于儿童不能拿到的地方。如果吞食了电池，应立即往医生处要求诊治。

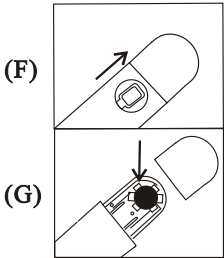

品质保证

- 在用户按本技术使用说明书正确使用体温计的前提下，本产品自购买之日起一年内免费保修。
- 我方对因下列使用者个人的原因而造成的故障将不提供免费保修服务。如：
 - 擅自拆装、改装该产品而造成的故障；
 - 在使用、搬运的过程中不慎摔打、跌落而造成的故障；
 - 因缺乏合理的保养而造成的故障；
 - 没有按使用说明书的正确指示进行操作而造成的故障；
 - 因非我司授权的维修店的不当修理而造成的故障等等。
- 在要求提供免费保修服务时，您必须持填有购买日期和购买店印章的单据。请务必在购买本产品时要求店员开据此单据并加盖店章。
- 保修范围外的修理服务，将按规定收费。
- 在要求提供保修服务时，请携带本品。

产品的丢弃应符合法律法规要求