


Kenmerken - SV22-92011
- SV22-92012
- SV22-92013
- SV22-92025

- 1 Staander
- 2 Notebookruimte
- 3 Werkvlak
- 4 Electronische, zelfsluitende medicijnenlade
- 5 Kantelbare toetsenbordplank en polssteun
- 6 Rechter-/linkermuisplank en -houder
- 7 Kabelbeheer
- 8 Vergrendeling voor staander
- 9 Vergrendelbare zwenkwielen voor
- 10 Scannerhouderbeugel
- 11 Ergonomische achterhandgreep
- 12 Opbergmand
- 13 Stroomsysteem - 220-240 V wisselstroom, 50 Hz
 - a 55 Ah accu
 - b 3 wisselstroomstopcontacten (300 Watt totaal)
 - c Bedieningspaneel (Remote User Interface - RUI)
 - d Spiraalnetsnoer

Lees deze gids volledig door. Gooi deze gids niet weg nadat de montage is voltooid. Bewaar de gids op een veilige plaats om er later weer informatie in te kunnen opzoeken.

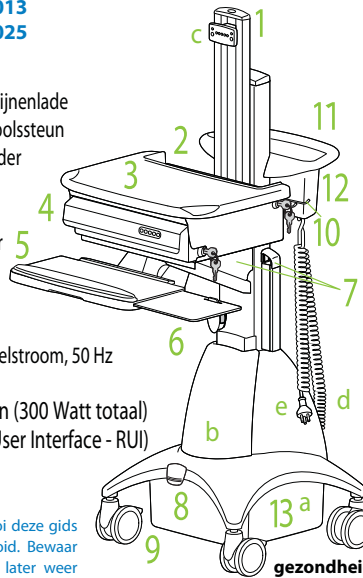


De StyleView-wagens met netvoeding verzorgen de wisselspanning voor mobiele automatiserings-apparatuur voor bij het ziekbed in gezondheidszorgomgevingen.

set-up&go
guide


Specificaties van de wagen - Voor specificaties van het stroomsysteem, zie pagina 12.

Bewegingsbereik

Verticaal verstelbereik: 508 mm

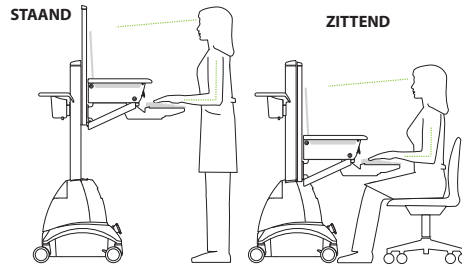


Kantelen: $\pm 15^\circ$ weergavehoek
Op basis van een notebook van 254 x 13 mm (H x D)

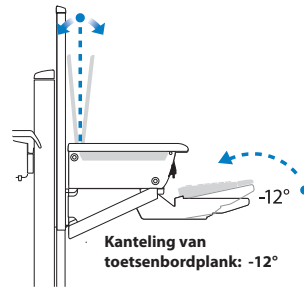

Gewichtscapaciteiten

Notebook	5-12 lbs	2.3-5.4 kg
Lade	4 lbs	1.8 kg
Werkvlak	2.5 lbs	1.1 kg
CPU-houder	25 lbs	11 kg
Toetsenbordplank	2.5 lbs	1.1 kg
Muis houder	.5 lb	.23 kg
Scannerhouderbeugel	.5 lb	.23 kg
Opbergmand	5 lbs	2.3 kg

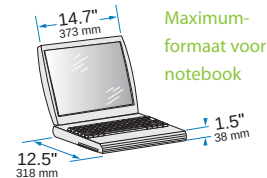

Maximum-formaat voor notebook

Richtlijnen lift-rem

Ontgrendeld



- Bij het op en neer bewegen van het werkoppervlak en de toetsenbordsteun
- Bij het afstellen van het liftmechanisme
- Bij het verzenden van de trolley met geïnstalleerde ankerschroeven

Vergrendeld



- Bij het gebruik van het toetsenbord of het muispad
- Bij het duwen van de trolley van de ene plaats naar de andere (met de lift in de laagste positie)



VOORZICHTIG: Het vastzetten van de liftvergrendeling tijdens normaal gebruik verhoogt de gewichtscapaciteit NIET. Laad NIET meer apparatuur dan de maximumgewichtscapaciteit die is gespecificeerd door Ergotron. Zorg voor optimaal functioneren van de lift door deze te testen en door zonodig de spanning aan te passen wanneer het gewicht dat op het apparaat rust wijzigt (bijv. als u apparatuur verwijdert of toevoegt). Raadpleeg de aanwijzingen onder "De spanning van de staander instellen" bij stap 6 op pagina 4.

For the latest User Installation Guide and StyleLink Software Download please visit:

Encontrará la versión más reciente del manual de instalación del usuario y el software de StyleLink en:
Si vous souhaitez télécharger le dernier manuel d'installation de l'utilisateur ou le logiciel StyleLink, rendez-vous sur:
Den neuesten Installationsleitfaden für Benutzer sowie den neuesten StyleLink-Software-download finden Sie unter:
Voor de nieuwste Installatiehandleiding voor de gebruiker en voor het downloaden van StyleLink-software gaat u naar:
Per scaricare le versioni più recenti del manuale di installazione e del software StyleLink, andare al sito:
最新版ユーザインストールガイドとスタイルリンクソフトウェアは次のサイトでダウンロードできます。
请从下列地址获取最新版本的用戶安裝指南和 StyleLink 軟件下載：
사용자 설치 안내서 및 StyleLink 소프트웨어 다운로드를 다음 웹 사이트에서 제공하고 있습니다.



User's Guide - English
Guía del usuario - Español
Manuel de l'utilisateur - Français
Gebruikersgids - Nederlands
Benutzerhandbuch - Deutsch
Guida per l'utente - Italiano
ユーザーガイド - 日本語
用戶指南 - 汉语
사용자 안내서 - 대한민국




www.ergotron.com

USA 1-800-888-8458

Europe +31 (0)33-45 45 600

China 86-769-86018920


Afmetingen

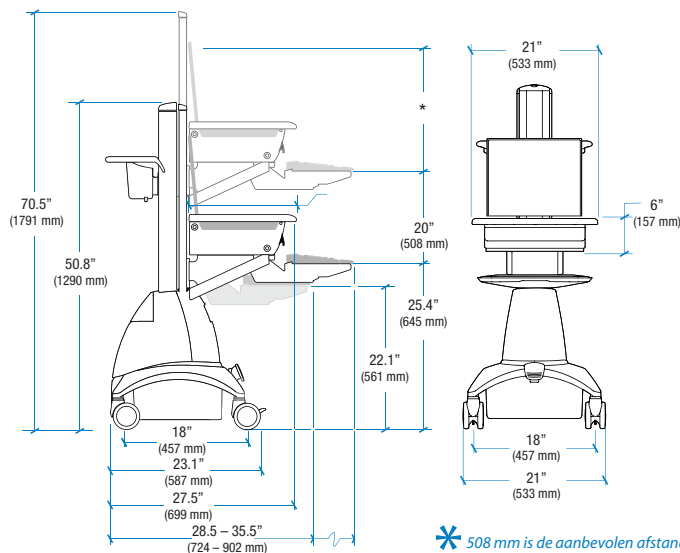


* 508 mm is de aanbevolen afstand tussen de bovenkant van de toetsenbordplank en de bovenkant van het beeldscherm.

Apparatuur monteren

- 1 Bereid de montage van de wagen voor.
Verzamel de gereedschappen voor het monteren.

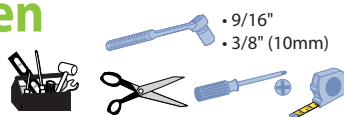

Zorg ervoor dat de liftspanning op het minimum is ingesteld door de instelbout tegen de klok in te draaien (naar het minteken (+) tot ze stopt.

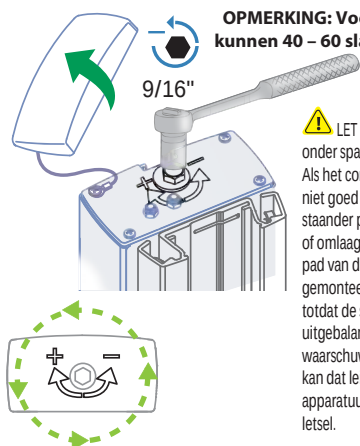

OPMERKING: Voor de afstelling kunnen 40 – 60 slagen nodig zijn.

! LET OP: De staander staat onder spanning van een veer. Als het contragewicht (nog) niet goed is ingesteld, kan de staander plotseling omhoog of omlaag komen. Blijf uit het pad van de staander of van gemonteerde onderdelen totdat de staander goed is uitgebalanceerd. Als u deze waarschuwing niet opvolgt, kan dat leiden tot schade aan apparatuur of tot persoonlijk letsel.

WAARSCHUWING

KANTELGEVAAR!
DE BEWEGENDE DELEN KUNNEN KNEUZINGEN EN SNIJWONDEN VEROORZAKEN.

Minimaliseer de optilspanning VOOR:

- Verwijdering van de transportschroeven
- Het verwijderen van gemonteerde apparatuur
- De wagen verzenden
- De wagen opslaan

Om de liftspanning te minimaliseren

1. Ontgrendel de rem en laat het werkvlak neer tot de laagste positie.
2. Draai de stelbout bovenaan de staander tegen de klok in tot ze stopt (de afstelling kan 40-60 slagen vergen).


Als u deze instructie niet opvolgt, kan dat tot ernstig persoonlijk letsel en/of beschadiging van de apparatuur leiden!

Voor meer informatie en instructies, zie de productgids op www.ergotron.com of neem contact op met de klantendienst van Ergotron op 1-800-888-8458.

822-050

- 2 Verwijder bij een geminimaliseerde liftspanning de schroeven die de staander aan de toren verankeren. Bewaar de schroeven voor later gebruik.


! LET OP: Maak geen andere moeren of schroeven op de staander of op de bovenkant van de toren los of vast en verwijder ze niet. Als u aan moeren of schroeven zit, kan de wagen instabiel worden, wat tot schade aan apparaten of lichamelijk letsel kan leiden.

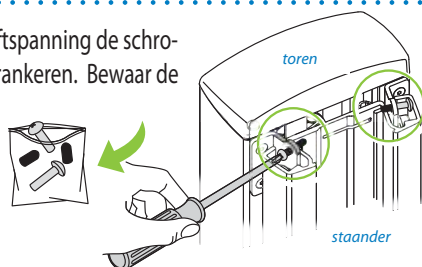

- 3 Bevestig het notebook

a Til het werkvlak op en plaats het notebook in de daarvoor bestemde ruimte.

b Bevestig klittenband aan de stootvoetjes en plak ze vast, zodat het notebook op zijn plek blijft liggen.

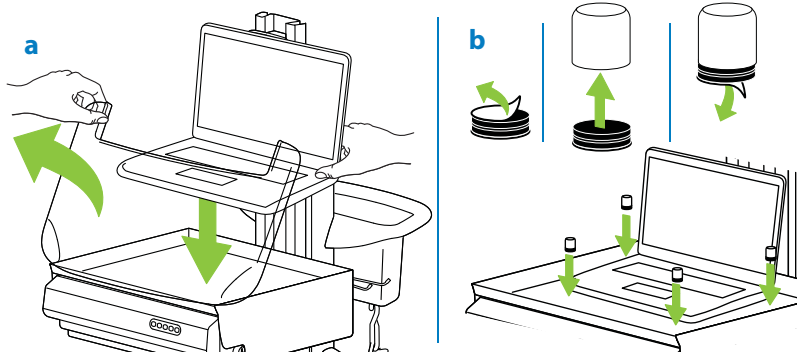

Apparatuur monteren

4 Kies een persoonlijke code voor de medicijnenlade.

a Maak de lade open met de loper (identieke duplicaatsleutels zijn meegeleverd). Trek de lade open om bij het batterijvak te kunnen; verwijder de afdekcap; plaats de vier meegeleverde AA-batterijen. Plaats de afdekcap terug en sluit de lade.

b Verwijder de sticker met de hoofdcodes die u vindt naast het cijferblok en plak hem in het vak rechts, zodat u hem veilig kunt bewaren en later raadplegen.


c Programmeer de persoonlijke code:

- 1 Voer de hoofdtoegangscode in
- 2 Druk tegelijkertijd op 3 en 5
- 3 Voer een nieuwe persoonlijke code in - een willekeurige groep van vijf cijfers

De lade is nu zo geprogrammeerd dat hij alleen open gaat wanneer de persoonlijke code of de hoofdcodes wordt ingevoerd.

De lade blijft 2 minuten lang open en het cijfer 5 blijft verlicht. Na twee minuten vergrendelt de lade zichzelf automatisch. U kunt de lade ook zelf vergrendelen door tegelijkertijd op 1 en 2 te drukken.

***** Bewaar deze handleiding samen met de lopers op een veilige plek zodat onbevoegden geen toegang hebben tot de zelfsluitende lade.

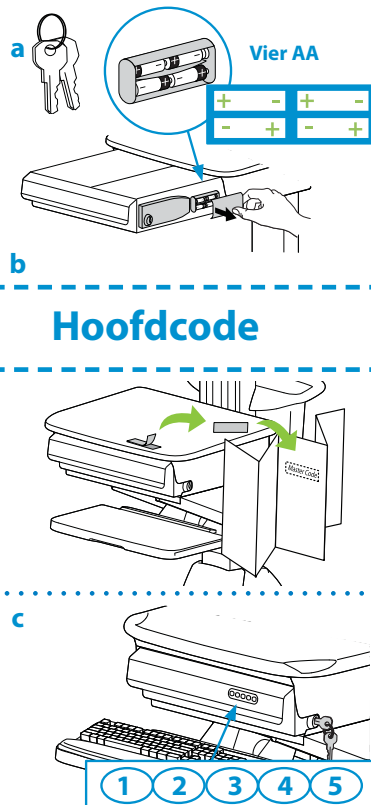

Tips voor de zelfsluitende lade

De lade openen - 3 methoden

- Met de sleutel - draai deze 1/8 slag naar rechts
- Voer de hoofdcodes in
- Voer de persoonlijke code in




Hoofdcodes

Persoonlijke Code


1 2 3 4 5

- 1 Voer de hoofdtoegangscode in
- 2 Druk op 3 en 5 tegelijkertijd (terwijl ze fllikeren)
- 3 Voer een nieuwe code in - een willekeurige groep van vijf cijfers

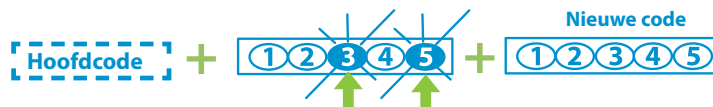


De persoonlijke code wissen

- 1 Voer de hoofdtoegangscode in
- 2 Druk tegelijkertijd op 3 en 5 (terwijl deze fllikeren)
- 3 Druk tegelijkertijd op 1 en 2

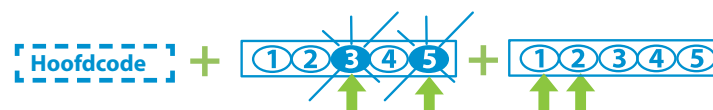

De lade sluiten - 2 methoden

- Druk op 1 en 2 op het cijferblok tegelijkertijd
- of
- Wacht twee minuten totdat de lade zichzelf automatisch vergrendelt

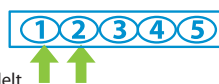

Automatisch



Problemen oplossen met de zelfsluitende lade

• De cijfertoetsen blijven donker

- Raak het cijferblok willekeurig ergens aan zodat de achtergrondverlichting gaat branden (de lade blijft vergrendeld totdat u een geldige code invoert)
- Als de achtergrondverlichting niet gaat branden wanneer u het cijferblok aanraakt, dan kunnen de batterijen leeg zijn, zie de aanwijzingen 4a.

• Cijfer 4 op het cijferblok fllikert = Waarschuwing voor batterijen bijna leeg

- De batterijen moeten waarschijnlijk worden vervangen, zie aanwijzingen 4a.

• De lade gaat niet open wanneer de persoonlijke wordt ingevoerd

- Test het systeem door de hoofdcodes in te voeren. Als de lade niet opengaat, vervang dan de batterijen zoals aangegeven bij 4a.

Waarschuwing: batterijen bijna leeg



Apparatuur monteren

5 Monteer de toetsenbordtoebehoren en de referentiekaart



- a** Plak dubbelzijdig plakband op de onderkant van de polssteun en plaats deze op de plank.
- b** Zet het toetsenbord vast op de plank met klittenband.
- c** Klik het muisetui op de rechter- of linkerkant van de plank vast.
- d** Bevestig de referentiekaart aan de handgreep met de kabelstrop.



De staanderspanning aanpassen


6 De spanning van de staander instellen.

- a** Ontgrendel de staander (liftvergrendeling omhoog).
- b** Beweeg de staander op en neer. Als u te veel weerstand voelt binnen het bewegingsbereik, of als de verstelling niet in de gewenste positie blijft staan, dan moet u de spanning aanpassen.
- c** Verwijder de afdekkap van de toren.
- d** Til de staander naar de hoogste positie op de toren.
- e** Draai de stelmoer naar behoefte omhoog of omlaag.
- f** Na het aanpassen controleert u de liftspanning door de staander op en neer te bewegen, zoals beschreven in stap 6b. Als de spanning nog meer moet worden aangepast, dan gaat u door met het draaien aan de stelmoer totdat de staander naar tevredenheid is ingesteld.

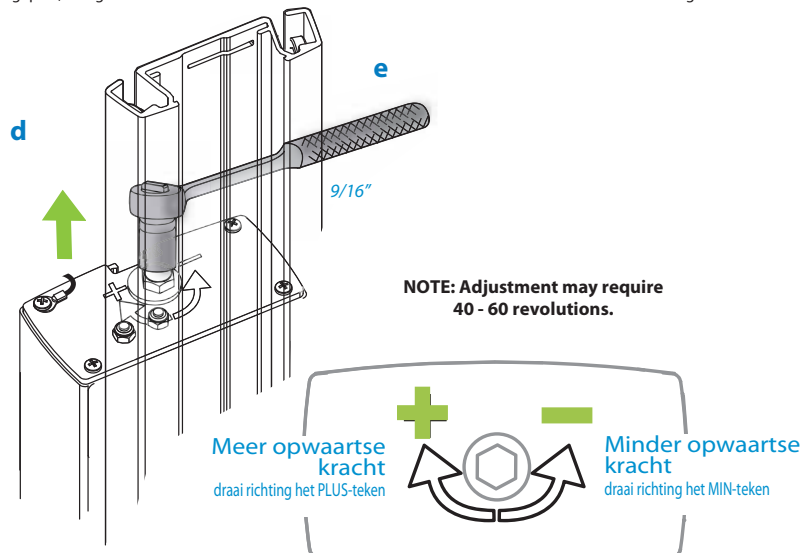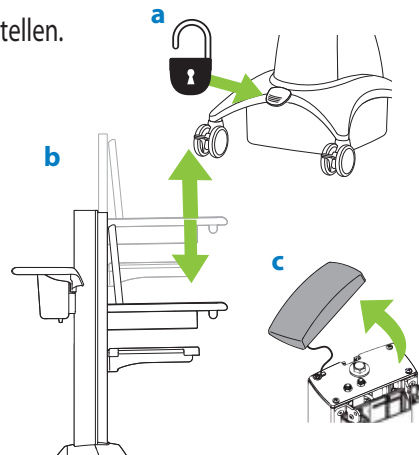

7 De kabels geleiden

- a** Til de staander naar de hoogste positie en trek de toetsenbord-/muisplank zo ver mogelijk uit.
- b** **Door de kabels te trekken terwijl de wagencomponenten volledig uitgetrokken zijn, zorgt u ervoor dat er voldoende lengte snoer overblijft voor onbelemmerd gebruik.*

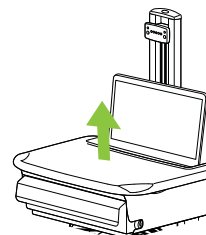

Kabels trekken

7 De kabels geleiden

c Sluit een einde van de RUI-kabels aan op de RUI die op de staander is bevestigd. Sluit het grijze snoer aan op de grijze aansluiting en het zwarte snoer op de zwarte aansluiting.

d Verwijder de zijpanelen van het kabelvak dat is bevestigd onder de lade. Trek de kabels van RUI en notebook langs de staander omlaag en in het kabelvak. Trek de toetsenbord- en muiskabels in het kabelvak. In het kabelvak bergt u overblijvende kabels en transformatoren op.

e Trek de kabels vanuit het kabelvak naar de kabelgeul. Bundel de kabels vanaf het kabelvak naar de kabelgeul in een 508 mm lang stuk flexibele buis (meegeleverd).


*** Laat ongeveer 508 mm kabel vrij tussen het kabelvak en de kabelgeul.**

f Trek de RUI-kabel samen met de stroomkabels omlaag door de kabelgeul naar de verdeelddoos onder het voorpaneel. Aangezien de configuratie van land tot land verschillend is, raadpleegt u de verdeelddoostabel op de volgende pagina voor aanwijzingen met betrekking tot het type verdeelddoos op uw wagen. Sluit de RUI-kabels aan en steek de stekkers in de stopcontacten volgens de aanwijzingen in de verdeelddoostabel.

⚠ LET OP: Geleid de snoeren alleen door de kabelgeul (rechts) van de wagen. Bewaar geen transformatoren in de voet. Wanneer u transformatoren bewaart in de voet, dan kunt u elektrische bedrading beschadigen en de werking van de lift nadelig beïnvloeden. Hierdoor kan schade ontstaan aan zowel de wagen als de gemonteerde apparatuur, en u kunt elektrische schokken oplopen.

g Sluit de kabelgeul om de gebundelde kabels en plaats de zijpanelen van het kabelvak terug. Beweeg de staander omhoog en omlaag om te controleren of alle kabels correct zijn geleid en de staander vrij kan bewegen. Stel dit indien nodig bij.

⚠ VOORZICHTIG: Let op het maximale vermogen, sluit geen apparatuur aan die meer dan 300 W vermogen van het stroomsysteem van uw StyleView wagen zal trekken. Als u zich niet houdt aan deze veiligheidsmaatregel, kan dat leiden tot schade aan apparatuur.

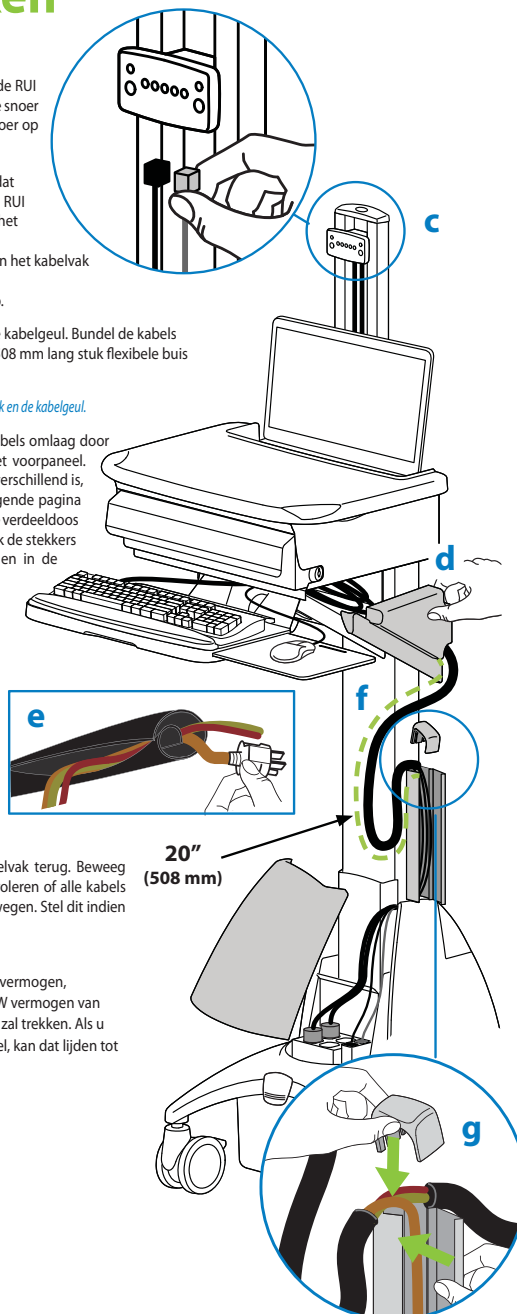

Verdeelddoostabel

(stap 6f)

China 220 - 240 V wisselstroom 50 Hz	Op dit systeem is geen verdeelddoos-afdekking noodzakelijk		
Europa, Australië, en Nieuw-Zeeland 220 - 240 V wisselstroom 50 Hz	2x 8-32 x 1/4		
Verenigd Koninkrijk en Singapore 220 - 240 V wisselstroom 50 Hz	2x 8-32 x 1/4		

De acculadercyclus


8 Bevestig de afdekkingen.

a Dek de kabels op de staander af.

b Plaats de afdekkap op de toren.

c Bevestig de afdekking op de bovenkant van de staander.

d Vergrendel de afdekking op de staander.

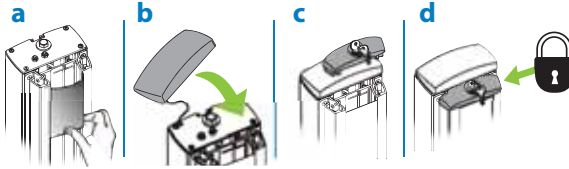


9 Laad de accu op

DE EERSTE KEER DE ACCU OPLADEN



Als u de accu voor het eerst oplaadt en/of als u de accu oplaadt nadat deze een tijdlang opgeslagen is geweest

a Steek het netsnoer in een geschikt stopcontact en controleer of het groene lichtje "100" flikkert, ten teken dat de accu wordt opgeladen. Laat de accu opladen tot het lampje niet meer knippert en permanent brandt.

b Schakel het stroomsysteem aan door de aan-/uittoets ingedrukt te houden (die u vindt op de RUI (1 - 3 seconden)). Het aan-/uitlampje, de acculaderlampjes en het lampje Ingeschakeld alarm gaan branden.

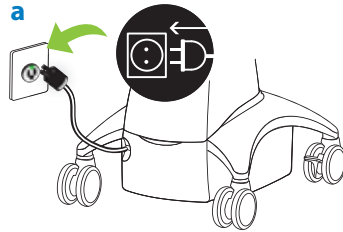


*Trek het spiraalsnoer niet verder dan 3 meter (10 ft) uit, anders kan het snoer worden beschadigd.

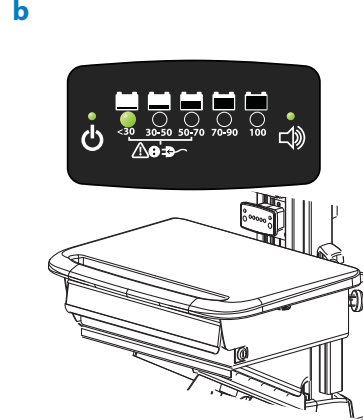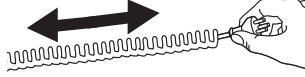

10 De acculading controleren - het bedieningspaneel (UI)

Als de accu leeg raakt, wordt dit aangegeven op de UI met een rijtje brandende of knipperende percentagelampjes (rood, geel en groen) en een alarm dat gaat piepen als de lading onder de 50% zakt. Raadpleeg de tabel voor veel voorkomende UI-berichten en hoe erop te reageren. Onthoud dat de accu dagelijks opnieuw moet worden opgeladen tot 100% en dat u de trolley tijdens het opladen kunt gebruiken -
OPMERKING: Zet het beeldscherm in de energiespaarstand om de gebruikstijd van de accu te optimaliseren.

*Veelvuldig gebruik van de wagen bij accuniveaus van minder dan 30% kan de levensduur van de accu significant verkorten.

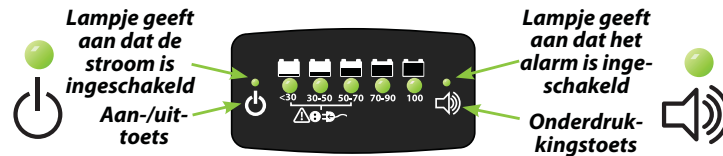

De acculaadcyclus - UI-waarschuwingen begrijpen en opvolgen

RUI-weergave	Waarschuwing Visueel Geluid	Acculaderstatus	Reactie
	100%-lampje flikkert groen	Bezig met opladen De stekker zit in het stopcontact	Laat de accu opladen totdat het 100%-lampje stopt met flikkeren. U kunt de wagen gebruiken tijdens het laden.
	30%- en 50%-lampjes geel Alarm piept	100% Vol	Wanneer het 100%-lampje stop met flikkeren, is de accu volledig geladen en kan de wagen losgemaakt worden van het stopcontact.
	30%-lampje flikkert rood Alarm piept	Tussen 50% en 30%	Het alarm weerklinkt totdat de trolley wordt aangesloten (druk de onderdrukkingstoets in om het alarm tijdelijk te onderbreken).
	30%-lampje flikkert rood Alarm piept	30% of minder	Het alarm weerklinkt totdat de trolley is aangesloten. Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact en laad de accu op tot 100%! U kunt de wagen gebruiken tijdens het opladen.
	Geen lampjes Geen alarm	0%	Geen voeding beschikbaar totdat de stekker in het stopcontact wordt gestoken.

De acculadercyclus

11 StyleLink

a Installeer de StyleLink-software (nadat de computer is aangesloten op de netspanning):

For the latest User Installation Guide and StyleLink Software Download please visit:

Encontrará la versión más reciente del manual de instalación del usuario y el software de StyleLink en:

Si vous souhaitez télécharger le dernier manuel d'installation de l'utilisateur ou le logiciel StyleLink, rendez-vous sur :

Den neuesten Installationsleitfaden für Benutzer sowie den neuesten StyleLink-Software-download finden Sie unter:

Voor de nieuwste Installatiehandleiding voor de gebruiker en voor het downloaden van StyleLink-software gaat u naar:

Per scaricare le versioni più recenti del manuale di installazione e del software StyleLink, andare al sito:

最新版ユーザーインストールガイドとスタイルリンク ソフトウェアは次のサイトでダウンロードできます。

请从下列地址获取最新版本的用戶安裝指南和 StyleLink 軟件下載：

사용자 설치 안내서 및 StyleLink 소프트웨어 다운로드를 다음 웹 사이트에서 제공하고 있습니다.



User's Guide - English
Guía del usuario - Español
Manuel de l'utilisateur - Français
Gebruikersgids - Nederlands
Benutzerhandbuch - Deutsch
Guida per l'utente - Italiano
ユーザーガイド : 日本語
用戶指南 : 汉语
사용자 안내서 : 대한민국



www.ergotron.com

USA 1-800-888-8458

Europe +31 (0)33-45 45 600

China 86-769-86018920


b Als de software is geïnstalleerd, sluit u een einde van de USB-kabel aan op de USB-poort van de computer die op de wagen is gemonteerd.

c Trek de USB-kabel door de geul op de zijkant van de toren.

d Sluit het andere einde van de USB-kabel aan op de USB-poort op de voet van de wagen, voor de verdeelbus.

OPMERKING: Wanneer u StyleLink-software downloadt en gebruikt, dan is de garantieperiode voor uw batterij 1 jaar.

***** Zie het helpbestand van de StyleLink-software voor nadere informatie.

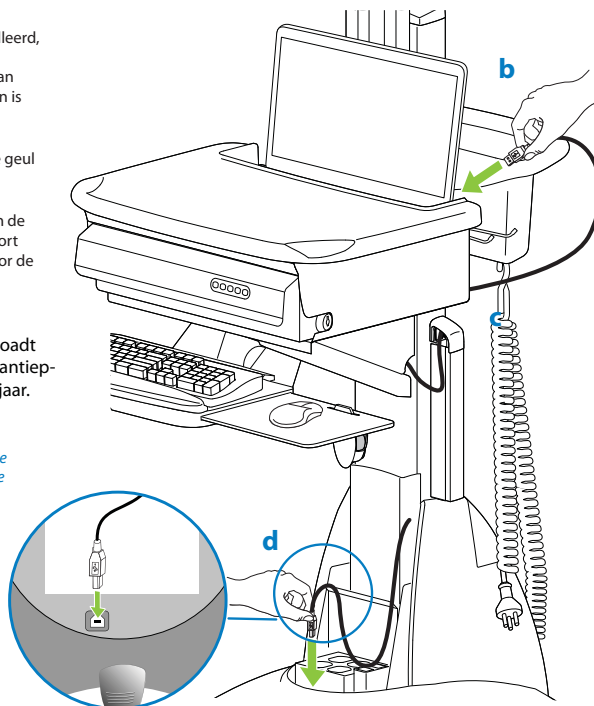

De installatie is voltooid - uw wagen is klaar voor gebruik!

Op de volgende pagina's vindt u belangrijke aanwijzingen voor veilig gebruik en onderhoud van de StyleView wagen en het stroomstelsel.

Meer informatie over de StyleView wagen en andere producten van Ergotron vindt u op onze webpagina.

www.ergotron.com

De accu vervangen



WAARSCHUWING: Voor het StyleView stroomstelsel mogen uitsluitend door Ergotron opgegeven accu's worden gebruikt.




Neem contact op met de klantenservice voor nadere gegevens.
Vervang de accu's niet in een zuurstofrijke of gevaarlijke omgeving. Er kunnen namelijk vonken ontstaan.

*** Verwijder de accu volgens de stappen (a) - (i) voor opslag op lange termijn, en ga dan verder met de stappen (k) - (p) hieronder om de vervangende accu aan te sluiten.**


k Als u de accu uit de wagen hebt verwijderd, tilt u hem uit de lade. Zorg voor hergebruik van de accu of neem contact op met Ergotron voor aanwijzingen hoe u de accu netjes afvoert.

l Plaats de nieuwe accu in de lade; schuif de accu in de wagen.

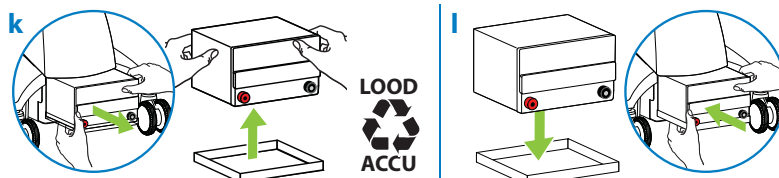


m Verwijder de beschermkap zodat de rode (+) aansluiting bloot komt te liggen. Verbindt de rode (+) aansluiting met de accu met de aansluitmoer en een sleutel. **Sluit de rode pool aan VOORDAT u de zwarte pool aansluit!** Zorg dat u geen contact maakt tussen de aansluitingen op de accu en de metalen behuizing (bijv. met uw gereedschap). Plaats de beschermkap op de rode aansluiting.

n Verwijder de beschermkap zodat de zwarte (-) aansluiting bloot komt te liggen. Verbindt de zwarte (-) aansluiting met de accu met de aansluitmoer en een sleutel. **Sluit de zwarte pool aan NADAT u de rode pool hebt aangesloten!** Zorg dat u geen contact maakt tussen de aansluitingen op de accu en de metalen behuizing (bijv. met uw gereedschap). Plaats de beschermkap op de zwarte aansluiting.

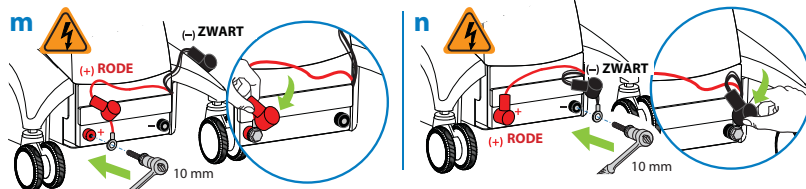

o Sluit de kabelhaspel aan.

p Plaats het voorpaneel op de wagen en zet de schroeven vast.

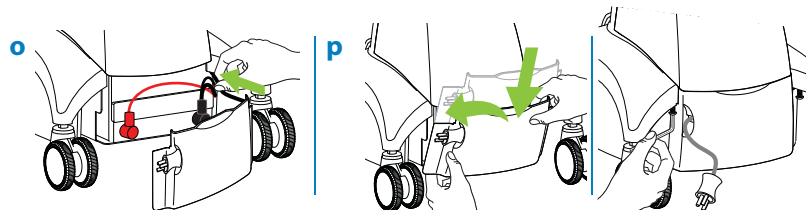

Opslaan van het stroomstelsel

- KORTE TERMIJN

*** Als het stroomstelsel een tijdlang, maar niet langer dan drie maanden, niet gebruikt gaat worden, dan moet de accu volledig worden opgeladen voordat hij wordt opgeslagen en tijdens opslag worden bijgeladen.**


Als het stroomstelsel langer dan 3 maanden niet gebruikt gaat worden, dan moet de accu uit de wagen worden verwijderd en opgeslagen. Volg de aanwijzingen onder LANGE TERMIJN!

a Schakel alle gemonteerde apparatuur uit.

b Steek de stekker in een geschikt stopcontact en laad de accu op tot 100% (alle RUI-lampjes branden). Het stroomstelsel moet volledig opgeladen zijn voor opslag!

c Als de accu volledig is opgeladen, zet u het stroomstelsel uit door de aan-/uittoets op de RUI 1 - 3 seconden ingedrukt te houden. Het aan-/uitlampje gaat uit.

d Laat indien mogelijk het netsnoer aangesloten op een geschikt stopcontact. Als er voor de opslag van de wagen geen stopcontact beschikbaar is, maak dan de RUI-kabels los uit de aansluitingen op de zijkant van de verdeeldoos, en plaats de afdekking terug. Als de wagen tijdens opslag niet op een stopcontact is aangesloten, moet de batterij eenmaal per maand worden opgeladen.

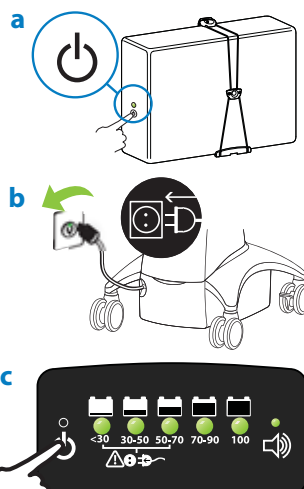


MEDEDELING: De garantie op volledig opgeladen accu's vervalt automatisch als deze gedurende meer dan drie (3) maanden aaneengesloten niet worden gebruikt. De garantie op volledig lege batterijen vervalt automatisch als deze gedurende meer dan drie (3) dagen aaneengesloten niet worden gebruikt.

Opslaan van het stroomsysteem

- **LANGE TERMIJN** * Als het stroomsysteem langer dan 3 maanden niet gebruikt gaat worden, dan moet de accu uit de wagen worden verwijderd en opgeslagen. Volg onderstaande aanwijzingen.


Als het stroomsysteem minder dan 3 maanden niet gebruikt gaat worden, volg dan de aanwijzingen voor opslag op korte termijn hierboven!

1 Verwijder de batterijen uit de zelfsluitende lade.

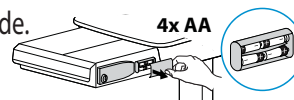


2 Verwijder de voedingsbatterij.


a Schakel alle gemonteerde apparatuur uit.

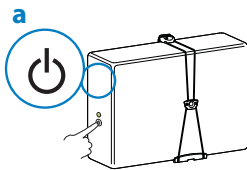


b Koppel het stroomsysteem los van de voeding.

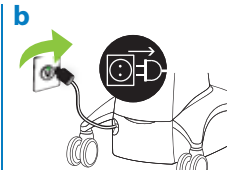

c Zet het stroomsysteem uit door de aan-/uittoets op de RUI ingedrukt te houden. Het aan-/uitlampje gaat uit.

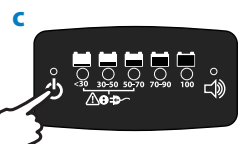


d Verwijder het voorpaneel en maak de RUI-kabels los van de aansluitingen aan de zijkant van de verdeeldoos.

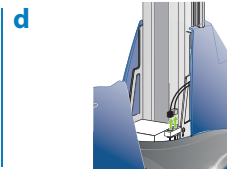


e Verwijder de afdekking van de accu.




f Maak de kabelhaspel los zodat u makkelijker overal bij kunt.

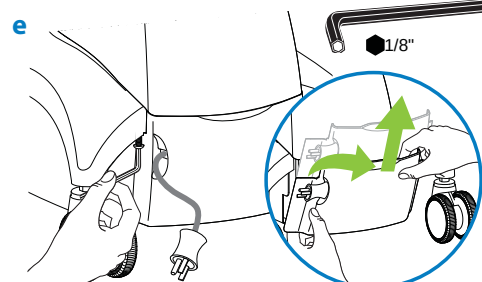

g Verwijder de beschermkap van de zwarte pool (-). Zorg dat u geen contact maakt met uw gereedschap tussen de aansluitingen op de accu en de metalen behuizing. Verwijder met een sleutel de moer van de zwarte (-) pool. Schuif de beschermkap over de nu blootliggende aansluiting.

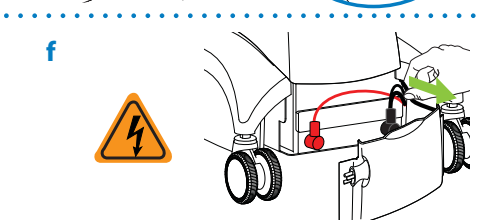


h Herhaal stap (g) voor de rode (+) pool. Zorg dat u geen contact maakt met uw gereedschap tussen de aansluitingen op de accu en de metalen behuizing.

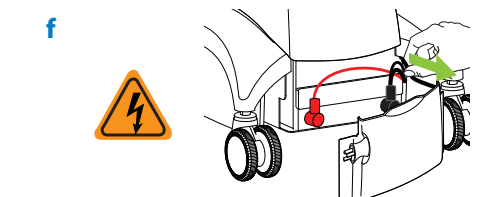



i Verwijder de accu en sla deze op in een koele, droge omgeving voor zolang als u de wagen niet gebruikt. De optimale opslagtemperatuur is 15°C (59°F). U dient elke drie (3) maanden de accuspanning te controleren. Als de spanning minder wordt dan 12,5 V wisselstroom, dan moet de accu opnieuw helemaal worden opgeladen. Raadpleeg de klantenservice van Ergotron voor informatie over hoe opslag van belang kan zijn voor de garantie op de accu.

j Duw voorzichtig de polen met hun beschermkappen terug in de ruimte die is overgebleven na verwijdering van de accu en plaats de accuafdekking weer terug op de voet.

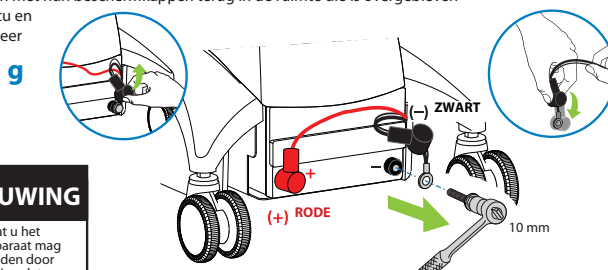

WAARSCHUWING

Koppel de voeding los voordat u het apparaat open maakt. Dit apparaat mag uitsluitend worden onderhouden door daartoe bevoegd personeel. Voordat u het apparaat open maakt of de accu vervangt, moet u deze handleiding hebben doorgelezen en begrepen.

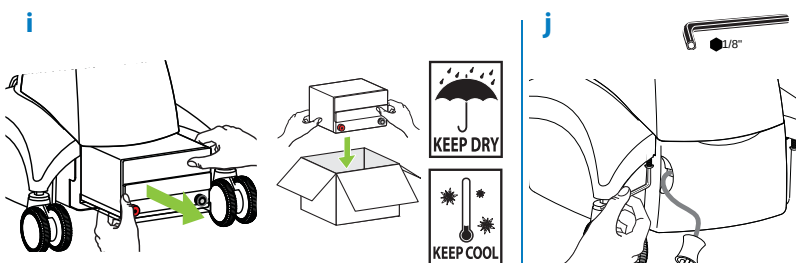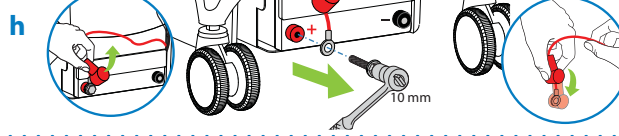

Veiligheidsregels voor de wagen

⚠️ Wijzigingen in apparatuur en transport van de wagen



⚠️ Reiniging en onderhoud

De volgende procedures vormen geen garantie tegen infectie. Raadpleeg de persoon die verantwoordelijk is voor infectiebeheersing of de epidemioloog voor reinigingsprocedures en -processen.

- ⚠️ Vermijd elektrische schokken, stel de elektrische componenten niet bloot aan water, schoonmaakoplossingen of andere potentieel corrosieve vloeistoffen of substanties.
 - ⚠️ Dompel de wagen of onderdelen van de wagen niet onder in vloeistof en zorg dat er geen vloeistoffen in de wagen kunnen komen. Veeg alle schoonmaakmiddelen onmiddellijk van het oppervlak met een vochtige doek. Maak het oppervlak na schoonmaak grondig droog.
 - ⚠️ Gebruik geen ontvlambare schoonmaakmiddelen op het oppervlak van de wagen, deze komen immers dicht in de buurt van elektrische spanning en apparatuur.
- Alle verf en plastic wagenonderdelen zijn bestand tegen schoonmaak met de meeste veelgebruikte, verdunde, niet-bijtende oplossingen zoals ammoniumverbindingen, bleekmiddelen met ammoniakenzymen, bleekmiddel of alcoholoplossingen.
- Pen- en markervlekken kunnen worden verwijderd met 91% isopropylalcohol en een zachte doek.
 - Jodiumvlekken kunnen worden verwijderd met algemeen gebruikelijke schoonmaakmiddelen en een zachte doek.
 - Gebruik nooit staalwol of andere ruwe materialen omdat deze de afwerking van het oppervlak beschadigen.
 - Gebruik geen solventen zoals trichloorethyleen en aceton. Deze solventen zullen de oppervlaktefinish beschadigen.

Test schoonmaakmiddelen eerst uit op een klein, onopvallend stukje oppervlak.

⚠️ **Aanpassing, onderhoud, vervanging** - Probeer NIET om enig onderdeel van de StyleView wagen aan te passen, te onderhouden of te vervangen tenzij in door Ergotron goedgekeurde documentatie (bijv. de installatie-instructies) hiertoe aanwijzingen staan. Alleen Ergotron Inc. of een door Ergotron gecertificeerde organisatie mag StyleView wagencomponenten aanpassen, onderhouden of vervangen. Als er een onderdeel van de wagen ontbreekt of beschadigd is, gebruik de wagen dan niet en neem onmiddellijk contact op met de klantenservice van Ergotron voor een reserveonderdeel.

⚠️ **Kabels** - Houd kabels netjes bij elkaar op de wagen (bij uw wagen horen een aantal verschillende oplossingen voor dit doel). Ongebruikte stukken kabel moeten uit de buurt van bewegende onderdelen gehouden worden door middel van kabelklemmen. Raadpleeg het gedeelte over kabels trekken in deze handleiding, of neem contact op met de klantenservice van Ergotron voor meer informatie.

⚠️ **Zwenkwielen** - Controleer de zwenkwielen regelmatig om ze schoon te houden en vrij van rommel die soepel rijden zou kunnen beïnvloeden. Rij zo mogelijk niet over ongelijkmatige, vuile of beschadigde oppervlakken.

⚖️ ⚠️ **Eigen apparatuur** - Zorg ervoor dat apparatuur in evenwicht is en stevig op de wagen gemonteerd is. Verplaats geen onderdelen van de wagen op de staander of toren, tenzij in de installatie-instructies staat dat dat moet. Als u onderdelen van de wagen te ver omhoog of omlaag plaatst op de staander, kan de wagen instabiel worden, waardoor apparatuur beschadigd kan raken of zelfs persoonlijk letsel kan optreden. Neem contact op met de klantenservice van Ergotron voor informatie over het verplaatsen van onderdelen van de wagen.

⚠️ **Stabiliteit van de wagen** - Wanneer u de wagen verplaatst, MOET de staander in de laagste stand staan en MOET de liftvergrendeling omlaag staan, dit om omkiepen te voorkomen. Als u de staander niet op de laagste stand vastzet met de liftvergrendeling kan dat leiden tot persoonlijk letsel of schade aan apparatuur.

Veiligheidswaarschuwingen bij dit product

De volgende waarschuwingen komen voor in deze handleiding of op de wagen:

OPMERKING: Als u deze richtlijnen niet opvolgt, kan dat leiden tot schade aan apparatuur of tot persoonlijk letsel.

- ⚠️ **VOORZICHTIG:** Met de liftvergrendeling stabiliseert u het werkvlak en de toetsenbordplank tijdens normaal gebruik, maar hij zorgt NIET voor meer gewichtscapaciteit. Laad NIET meer apparatuur dan de maximumgewichtscapaciteit die is gespecificeerd door Ergotron. Zorg voor optimaal functioneren van de lift door deze te testen en door zonnig de spanning aan te passen wanneer het gewicht dat op het apparaat rust wijzigt (bijv. als u apparatuur verwijdert of toevoegt). Raadpleeg de aanwijzingen onder "De spanning van de staander instellen" bij stap 6 op pagina 4.
- ⚠️ **VOORZICHTIG:** Gebruik de StyleView wagen niet als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn! Verwijder, wijzig of vervang geen onderdelen van de wagen zonder Ergotron te raadplegen. Als u problemen hebt met de installatie of het gebruik van de wagen, neem dan contact op met de klantenservice van Ergotron.
- ⚠️ **VOORZICHTIG:** Draai de bevestigingen niet te vast. Te vast draaien kan uw apparatuur beschadigen.
- ⚠️ **VOORZICHTIG:** De staander staat onder spanning van een veer. Als het contragewicht (nog) niet goed is ingesteld, kan de staander plotseling omhoog of omlaag komen. Vergrendel de staander met de liftvergrendeling voordat u de ankerschroeven verwijdert of apparatuur aanbrengt of verwijdert. Blijf uit het pad van de staander of van gemonteerde onderdelen totdat de staander goed is uitgebalanceerd. Als u deze waarschuwing niet opvolgt, kan dat leiden tot schade aan apparatuur of tot persoonlijk letsel.
- ⚠️ **VOORZICHTIG:** Maak geen andere moeren of Schroeven op de staander of op de bovenkant van de toren los of vast en verwijder ze niet. Als u aan moeren of Schroeven zit, kan de wagen instabiel worden, wat tot schade aan apparaten of lichamelijk letsel kan leiden.

Veiligheidsregels voor de wagen

Veiligheidswaarschuwingen bij dit product

De volgende waarschuwingen komen voor in deze handleiding of op de wagen:

OPMERKING: Als u deze richtlijnen niet opvolgt, kan dat leiden tot schade aan apparatuur of tot persoonlijk letsel.

WAARSCHUWING: Maak de liftvergrendeling los voordat u het werkvlak beweegt! Wanneer u het werkvlak beweegt terwijl de liftvergrendeling vast zit, kan dat het liftmechanisme ernstig beschadigen.

WAARSCHUWING: In het geval dat de StyleView Cart gerepareerd moet worden, dient u onmiddellijk contact op te nemen met de klantenservice van Ergotron. De wagen kan uitsluitend worden gerepareerd door Ergotron, Inc. of door een door Ergotron geautoriseerde vertegenwoordiger.


LET OP: Geleid de snoeren alleen door de snoergeul (rechts) van de wagen. Bewaar geen transformatoren in de voet. Wanneer u transformatoren bewaart in de voet, dan kunt u elektrische bedrading beschadigen en de werking van de lift nadelig beïnvloeden. Hierdoor kan schade ontstaan aan zowel de wagen als de gemonteerde apparatuur, en u kunt elektrische schokken oplopen.

Ergonomie van de wagen

Werken

Pas de wagen aan - aan uw lengte


- 1 Stel het beeldscherm in op ongeveer 2,5 cm boven uw oogniveau - maak de liftvergrendeling los zodat de staander omhoog en omlaag kan bewegen zoals hierboven weergegeven.
- 2 Kantel het scherm totdat u het comfortabel kunt lezen; hierdoor ontziet u uw ogen en uw nek.
- 3 Trek de toetsenbordplank naar voren en plaats de muisplank en het muisetui naar believen aan de rechter- of linkerkant.
- 4 Werk met uw ellebogen ongeveer 90° gebogen; hierdoor ontziet u uw armspieren.
- 5 Als de staander moeilijk op en neer gaat, of als hij niet in de gewenste stand blijft staan, lees dan in de handleiding bij dit product hoe u dit aanpast.
- 6 Ga mee met de stroom!
Steek wanneer dat maar mogelijk is de stekker in het stopcontact zodat de accu opgeladen blijft en de computer kan blijven draaien.*

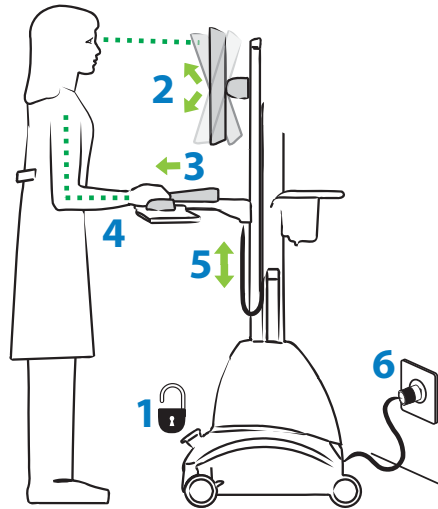

Verplaatsen

berg op - voordat u uw hielen licht

- 1 Kijk uit waar u heengaat: maak de liftvergrendeling los en laat de staander zakken zodat hij uw zicht niet blokkeert.
- 2 Doe open laden dicht en berg muis, scanner en andere toebehoren op op hun juiste plek.
- 3 Zet de liftvergrendeling vast zodat de staander omlaag blijft staan en de apparatuur veilig is tijdens het rijden met de wagen.
- 4 Ontgrendel beide voorste zwenkwielen.
- 5 Duw de wagen vanaf de achterkant met uw ellebogen ongeveer 90° gebogen; hierdoor hebt u maximale controle en ontziet u uw armspieren.
- 6 Haast u langzaam!
Voordat u gaat rijden, controleert u of de stekker uit het stopcontact is gehaald en het netsnoer aan de mand is gehaakt voor veilig vervoer. En onthoud: elke dag moet de accu 100% worden opgeladen!

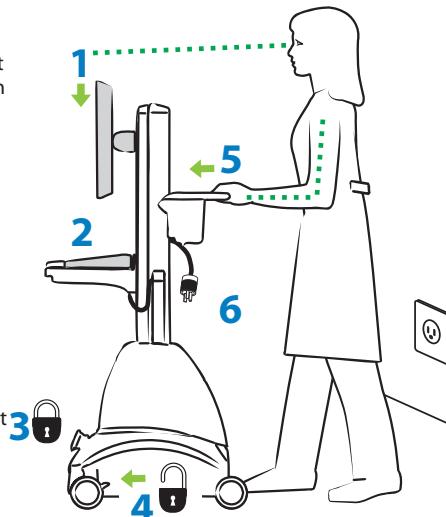

Veiligheidsregels voor de wagen

⚠ GEVAAR!
ELEKTRISCHE KABELS KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN
Misbruik kan een elektrische schok opleveren en **BRAND** of **DOOD** tot gevolg hebben.
Lees de gebruikersinstructies door en neem ze in acht.



DIT LABEL NIET VERWIJDEREN!

- Controleer de kabel grondig voor gebruik; NIET GEBRUIKEN INDIEN BESCHADIGD;
- Sluit niet meer dan het VERMEDE AANTAL WATTS op het stroomsysteem aan;
- Zorg ervoor dat de kabel niet door deuropeningen, openingen in het plafond, muren of vloeren getrokken wordt;
- Zorg ervoor dat de STEKKER VOLLEDIG in het stopcontact is gestoken;
- Metalen pennen en staafjes in of aan de kabel mogen niet worden verwijderd, gebogen of aangepast;
- Gebruik geen overdadige kracht bij het maken van aansluitingen;
- Houd de kabel uit de buurt van water; NIET GEBRUIKEN INDIEN NAT;
- Houd kinderen uit de buurt van de kabel;
- Sluit de kabel niet aan op een verlengsnoer;
- VOORKOM OVERVERHITTING. Trek de kabel recht en leg er geen andere materialen bovenop;
- Rijd of trek geen objecten over de kabel of plaats geen objecten op de kabel; ga niet op de kabel staan;
- PAK DE STEKKER VAST om deze uit het stopcontact te trekken; trek de stekker nooit uit het stopcontact door te trekken aan de kabel.

Specificaties van het stroomsysteem

- 220 - 240 V wisselstroom / 50 Hz stroomsysteem

SV22-92011 SV22-92013

SV22-92012 SV22-92025

Ingang: 220 - 240 V wisselstroom / 50 Hz, 2,7 A

Uitgang: 230 V wisselstroom / 50 Hz

Met behulp van het StyleView AC Power System (SPS) kunt u uw eigen stroomvoorziening meenemen tijdens het verplaatsen van de wagen. Het stroomsysteem is geïntegreerd in de voet van de wagen en is standaard uitgerust met accu, omvormer met sinusvormige uitgangsspanning, ATS, RUI, oplader, scheidingstransformator, verdeelbus en netsnoer.

• Omvormer met sinusvormige uitgangsspanning (True Sine Wave - TSW): zorgt voor correcte werking van apparaten met spanningsfactorcorrectie, zoals platte beeldschermen.


• Automatische overdrachtschakelaar (Automatic Transfer Switch - ATS): hierdoor kan aangesloten computerapparatuur overschakelen naar "huisstroom" tijdens het opladen van de accu.

• Aansluiting voor gebruiker op afstand (Remote User Interface - RUI): Bevindt zich in de nabijheid van het werkvlak; hiermee kunt u het stroomsysteem in- en uitschakelen en controleren in hoeverre de accu geladen is. Ook geeft de RUI een auditief alarm als de accu opgeladen moet worden.

• 55 Ah verzegelde loodzuuraccu met geabsorbeerde glasafwerking, ventielregeling en recombinant gastype, 12 V gelijkstroom.

• De aanbevolen opslagtemperatuur voor de wagen is 15 °C. Bij deze temperatuur wordt het capaciteitsverlies door veroudering van de 55 Ah accu geminimaliseerd. De minimale opslagtemperatuur is -20 °C en de maximale opslagtemperatuur is 50 °C. De aanbevolen vochtigheidsgraad voor opslag is 0 - 95% rH.

• Wagen en stroomsysteem voldoen aan de norm EN 60601-1.

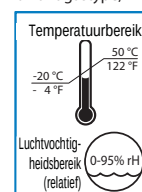


Voor meer informatie over dit product of over andere producten van Ergotron, bezoekt u onze webpagina: www.ergotron.com

Verklaring van overeenkomstigheid met FCC - Wagen en zelfsluitende lade

Deze zelfsluitende lade is getest en voldoet aan de grenzen die gesteld zijn aan een Klasse A digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze grenzen zijn bedoeld als een redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie wanneer de apparatuur wordt gebruikt in een commerciële omgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan hoogfrequente energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de handleiding, schadelijke interferentie veroorzaken aan radioverkeer. Het gebruik van deze apparatuur in een woonwijk kan mogelijk schadelijke interferentie veroorzaken in welk geval de gebruiker verplicht zal zijn deze interferentie op zijn eigen kosten te corrigeren.

Wijzigingen of modificaties die niet uitdrukkelijk goedgekeurd zijn door Ergotron, Inc. kunnen de toestemming aan de gebruiker om deze apparatuur te gebruiken, te niet doen.

Neem contact op met Ergotron voor volledige informatie over elektromagnetische compatibiliteit.

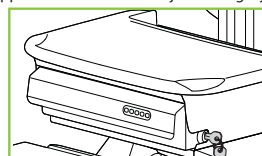

Productmarkeringen



Overzicht van gevarensymbolen

De betekenis van de symbolen die in deze handleiding, op de wagen of op het stroomsysteem worden gebruikt. Deze symbolen attenderen u op een veiligheidssituatie waarvoor uw aandacht nodig is. U moet in staat zijn de betekenis van de volgende veiligheidsrisico's te herkennen en te begrijpen als u deze tegenkomt op de wagen of in de documentatie met betrekking tot de wagen (zoals deze handleiding).

Kleur	Symbool	Signaalwoord	Mate van gevaar
Rood		GEVAAR	Duidt op een onmiddellijk gevaar, dat (indien genegeerd) kan leiden tot overlijden of ernstig letsel.
Oranje		WAARSCHUWING	Duidt op een potentieel gevaar dat (indien genegeerd) kan leiden tot overlijden of ernstig letsel.
Geel		VOORZICHTIG	Duidt op een potentieel gevaar dat (indien genegeerd) kan leiden tot licht of matig letsel.
Geen		VOORZICHTIG	Gebruikt zonder het waarschuwingssymbool duidt dit op een potentieel gevaar dat (indien genegeerd) kan leiden tot schade aan apparatuur.
Rood, oranje of geel		Elektrisch	Duidt op een dreigend elektrisch gevaar dat (indien genegeerd) kan leiden tot persoonlijk letsel, brand en/of overlijden.

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De lift gaat te makkelijk of te zwaar op en neer; of apparatuur op de lift blijft niet op de gewenste hoogte staan.	Onjuist contragewicht op de lift.	Raadpleeg de aanwijzingen onder "De spanning van de staander instellen" bij stap 6 op pagina 4.
	Gemonteerde apparatuur overschrijdt de gewichtscapaciteit.	Vergelijk het gewicht van de gemonteerde apparatuur met de aanbevolen gewichtscapaciteiten in het gedeelte Specificaties. Neem contact op met de klantenservice: Noord-Amerika 1-800-888-8458; Europa +31 (0)33-45 45 600

Symptoom	Oplossing
1) De lampjes op de aansluiting voor gebruiker op afstand (Remote User Interface - RUI) branden niet.	a) Houd de aan-/uittoets aan de linkerzijde van de RUI ingedrukt. Controleer of het kleine groene lampje boven de aan-/uitknop van de RUI tegelijk brandt met één of meerdere van de accu-indicatorlampjes. Als er meerdere lampjes op de RUI niet branden, ga dan door met de volgende stap. b) Controleer of de zwarte en grijze verbindingkabels niet zijn beschadigd en of ze correct zijn aangesloten door er zachtjes aan te trekken onderaan de RUI. Herhaal stap a). c) Trek het voorpaneel los en controleer of de zwarte en grijze verbindingkabels niet zijn beschadigd en of ze correct zijn aangesloten (door er zachtjes aan te trekken) op de bijpassende aansluitingen aan de zijkant van de verdeeldoos. Plaats het paneel terug en herhaal stap a). d) Neem contact op met de klantenservice VS: 1-800-888-8458 of Europa +31 (0)33-45 45 600
2) De verdeeldoos van de wagen geeft geen voeding.	a) Controleer of de RUI-lampjes branden en of de netsnoeren van de apparatuur correct zijn aangesloten op de verdeeldoos. Als de lampjes op de RUI niet branden, probeer dan de aanwijzingen bij probleem nr. 1 en ga dan verder met stap b). b) Koppel alle apparatuur los van de verdeeldoos. Gebruik een spanningsmeter om te controleren of de verdeeldoos de juiste voeding geeft. Houd de spanningsmeter aangesloten op één van de aansluitingen tijdens het verhelpen van het probleem. c) Sluit de wagen aan op een extern stopcontact dat aan de specificaties voldoet. d) Probeer de RUI aan te zetten. Houd de aan-/uittoets aan de linkerzijde van de RUI ingedrukt. Controleer of het kleine groene lampje boven de aan-/uitknop van de RUI brandt en of de spanningsmeter aangeeft dat de verdeeldoos de juiste voeding kan geven. Als de spanningsmeter geen spanning aangeeft op de verdeeldoos, gaat u door met de volgende stap. e) Controleer of het snoer van de verdeeldoos correct is aangesloten op de voedingsmodule. Probeer vervolgens stap d). f) Koppel de wagen los van de aansluiting met externe voeding en verwijder het deksel van het batterijvak om te controleren of het snoer correct is aangesloten op de aansluiting van de voedingsmodule. Sluit de wagen aan op een aansluiting met externe voeding die aan de specificaties voldoet en probeer stap d). g) Neem contact op met de klantenservice (VS: 1-800-888-8458 of Europa +31 (0)33-45 45 600 voor nadere aanwijzingen om het probleem op te lossen.
3) Mijn probleem kan met behulp van deze handleiding niet worden opgelost:	a) Neem contact op met de klantenservice, VS: 1-800-888-8458 of Europa +31 (0)33-45 45 600

Aanbevolen periodieke inspectie en onderhoud			
Onderdeel	Handeling	Hoe vaak	Door wie
Batterijen voor de zelfsluitende lade	4 st. AA-batterijen vervangen ¹	Vervangen wanneer nr. 4 op het cijferblok knippert	Elke gebruiker
SLA-accu stroomsysteem	Loodzuuraccu vervangen ¹	Op aanwijzing van StyleLink of wanneer de accu minder dan ½ zo lang meegaat als oorspronkelijk	IT-medewerker
Zwenkwieltjes	Inspecteren op slijtage en rommel	Maandelijks	Elke gebruiker
RUI, USB, computerkabels	Inspecteren op slijtage, beknelling, defecte aansluitingen	Maandelijks	Elke gebruiker
Spiraalsnoer	Inspecteren op slijtage, schade en uitrekking. Bevestigingshaak verplaatsen zodat snoer niet over de grond sleept	Wekelijks	Elke gebruiker
Maximumbelasting	Controleren of de maximaal geadviseerde belastingwaarden niet worden overschreden	Dagelijks	Elke gebruiker

¹ Voer alle batterijen en accu's af conform de plaatselijke voorschriften

Ergotron Garantiebepalingen

Ergotron garandeert dat haar producten vrij zullen zijn van fabricagefouten gedurende vijf (5) jaar. Uitgezonderd hiervan zijn de bepalingen zoals hier beneden vermeld.

Uitzonderlijke bepalingen in de garantie zijn:

- Drie (3) jaar garantie op alle Neo-Flex™ producten van Ergotron
- Ergotron geeft een garantie van twee (2) jaar op alle voedingsonderdelen; de batterijen hebben een werkingsgarantie van één (1) jaar (zie onderstaande beperkingen) en een garantie van zes (6) maanden tegen productiefouten.
- Opmerking: In de EU bedraagt de garantie tegen productiefouten twee (2) jaar.
- Garantie op OEM producten wederverkocht door Ergotron wordt gegeven en uitgevoerd door de oorspronkelijke fabrikant.
- Voor producten die zijn gerepareerd door Ergotron en verkocht door Ergotron geldt een garantie van 90 dagen.
- Garanties van Ergotron zijn niet overdraagbaar

Exclusieve remedie: Als enig Ergotron product defect is of wordt als gevolg van materiaal- of fabricagefouten gedurende de garanteperiode, zal de Koper het product retourneren aan Ergotron met een schriftelijke beschrijving van het defect. Ergotron zal terstond het product repareren danwel vervangen en opsturen naar de Koper zonder verdere kosten voor de Koper. Het feit van reparatie of vervanging van het product leidt niet tot hernieuwing of verlenging van de garanteperiode.

DEZE REMEDIE IS ALLEEN VAN TOEPASSING OP GARANTIE MET BETREKKING TOT HET FYSIEKE PRODUCT, behalve ingeval van persoonlijk letsel. Koper zal Ergotron direct schriftelijk inlichten over persoonlijk letsel dat ontstaan is als direct gevolg van het gebruik van Ergotron producten.

Uitzonderingen en beperkingen: Ergotron aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van persoonlijk letsel of schade veroorzaakt door onoordeelkundige installatie of gebruik van haar producten of voor zover installatie of gebruik afwijkt van wat beschreven is in de installatiehandleiding, toevoegingen aan de handleiding, technische bulletins of productdocumentatie of door installatie of gebruik van apparatuur wat is veranderd, beschadigd of op verkeerde wijze is gebruikt.

Garantie op volledig opgeladen accu's die langer dan drie (3) aaneengesloten maanden niet zijn gebruikt is automatisch vervallen. Garantie op volledig ontladen accu's die langer dan drie (3) aaneengesloten dagen niet zijn gebruikt is automatisch vervallen

Twee (2) jaar garantie op alle voedingsonderdelen van Ergotron; de batterijen hebben een werkingsgarantie van 90 dagen en een garantie van twee (2) jaar op productiefouten. De werkingsgarantie op de batterij kan verlengd worden tot één (1) jaar, als de klant bewijs van juist gebruik van de batterij ter evaluatie en definitieve goedkeuring kan verstrekken. Juist gebruik van de batterij wordt gedefinieerd als het gebruiken van de StyleLink software om aan te tonen dat de batterij niet meer dan 25 keer gedurende de levensloop van de batterij tot onder de 25% is ontladen, en ten minste elke 36 uur volledig is opgeladen.

Koper doet geen beroep op en Ergotron aanvaardt geen enkele aanspraken op de garantie anders dan de hierboven beschreven garantiebepalingen, voor zover de uitzonderingen en beperkingen hier niet op van toepassing zijn. Ergotron aanvaardt verder geen aansprakelijkheid jegens de Koper ten aanzien van gevolg-, indirecte, of andere vormen van schade veroorzaakt door of met betrekking tot de producten, het gebruik of onoordeelkundig gebruik, de correcte of incorrecte werking.

Hoofdkantoor Verenigde Staten

St. Paul, MN, Verenigde Staten
+1-651-681-7600
www.ergotron.com
sales@ergotron.com

EMEA Sales

Hoofdkantoor EMEA
Amersfoort
033 45 45 600
www.ergotron.com
info.eu@ergotron.com

APAC Sales

Hoofdkantoor APAC
Tokio, Japan
www.ergotron.com
info.apac@ergotron.com

Wereldwijde OEM Sales

Wereldwijde OEM Sales
www.ergotron.com
info.oem@ergotron.com



© 2009 Ergotron, Inc.
All rights reserved.

Ergotron, Inc. doet al het mogelijke om accurate en volledige informatie te verstrekken over de installatie en het gebruik van haar producten en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele redactionele fouten of omissies (inclusief fouten of omissies ontstaan door de vertaling vanuit het Engels naar een andere taal) of voor incidentele, speciale of vervolgschades van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het verstrekken van deze instructie en de prestaties van apparatuur in combinatie met deze instructies. Ergotron, Inc. behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het ontwerp van en/of de documentatie voor het product zonder kennisgeving aan de gebruikers ervan. Voor de meest actuele productinformatie of als u wilt weten of dit document beschikbaar is in een taal, anders dan hierin opgenomen, kunt u contact opnemen met de klantenservice van Ergotron. Niets van deze publicatie mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een retrievalsystem of worden verzonden op enige wijze; elektronisch, mechanisch, via fotokopieën, opnames of anderszins, zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van Ergotron, Inc., 1181 Trapp Road, Eagan, Minnesota, 55121, VS. Octrooien aangevraagd en octrooien toegewezen in de VS en daarbuiten. Ergotron is een geregistreerd handelsmerk van Ergotron, Inc.