

佛山市顺德区依士文电子仪器有限公司
注册地址: 广东省佛山市顺德区伦教北海大道二号
生产地址: 广东省佛山市顺德区伦教广珠路北段
28 号 528308
电 话: 0757-27727282、27727283
邮 箱: info@easymed.com.cn

Easymed®
易舒美

使用说明书



触摸屏电子血压计
型号: WM-601

前 言

产品结构

操作步骤

注意事项

联系方式

前言

欢迎使用易舒美腕式触摸屏电子血压计WM-601。本血压计造型轻巧，采用独特的轻触式操作，使用方便。


另外，本血压计选用预成型腕带取代难以操作的臂带，便于人们更加快捷简便地进行血压测量。

使用本产品前，请仔细阅读本说明书。如对测量结果有任何疑问，请向您的医生咨询。

产品结构



显示屏

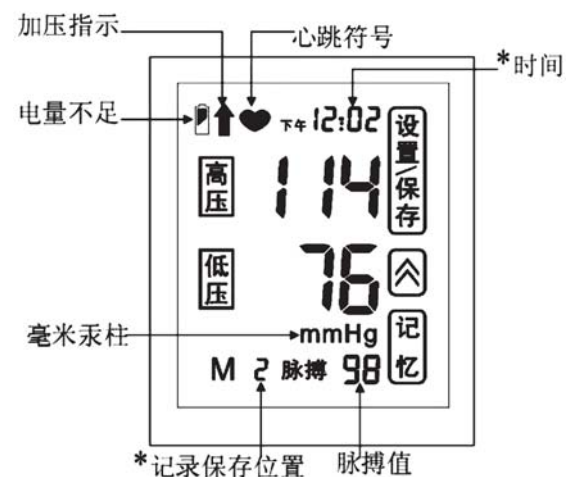

注：带 *号的显示功能只限于 WM-601 型典雅版



快速操作指引

- ① 开机/关机 或
开始测量/停止测量
- *② 设定日期与时间
- *③ 增加设定数值或查看上一个保存记录
- *④ 查看测量记录或查看下一个保存记录

注：带 *号的功能只限于 WM-601 型典雅版


特色功能

1. 轻触式操作。
- *2. 可保存 60 组测量记录。每个记录包括当次的测量结果和测量时间。
3. 自动关机功能。停止使用超过3分钟，血压计将自动关机。
4. 低电量警示。当电池符号在显示屏闪动时，表示电池电量不足，需更换新的电池。

操作步骤

步骤一 如何安装或更换电池

1. 用指尖扣住电池盖的凹位，往下压便可打开电池盖。
2. 将2节7号电池按照正负极装入电池盒，并盖上电池盖。

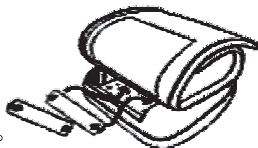

注意：

- ◆ 请将电池盖固定到位。
- ◆ 请使用2节相同的7号 1.5V 电池。
- ◆ 当电池符号  在显示屏中闪动时，表示电池电量不足，需要更换新的电池。
- ◆ 当轻触显示屏开机时，如显示屏无任何显示，则表示电池电量已用完，需要更换电池。（请不要使用可再充电电池）

*步骤二 如何设定时间/日期

为了更好地记录您的历史测量结果，建议在首次测量之前先为您的血压计设定正确的时间和日期。若取出电池，则需要重新设定时间和日期。

1. 若初次安装电池，轻触显示屏开机后，按“设置/保存”可设定年份。
2. 按了“设置/保存”后，年份数值“00”会在显示屏中闪烁显示，此时可按向上键  设置年份。若按住向上键  不放，数字将快速增大。
3. 当所要设定的年份出现在显示屏上时，再按一次“设置/保存”确认并保存该设定值。年份被设定的同时，月份的数字将会闪烁，此时可以设定月份。



4. 重复步骤2和3依次设定月、日、上午/下午、小时和分钟。

注意：日期和时间设定完毕后，显示屏自动进入测量界面，绑好腕带便可测量血压。


步骤三 如何使用腕带

1. 卷起袖管，让左手手心朝上，并将腕带套在裸露的左手手腕上。（若在右手手腕上测试，则将血压计套在右手手腕上。）

◆ 不要套在衣服上面使用。

◆ 请确保袖管不能太紧，否则阻碍手臂中血液的正常流动。

2. 将腕带固定在离手掌 1cm（大约一根食指的宽度）的位置上。

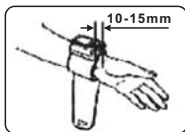

10

操作步骤

3. 抓住腕带的末端，将其拉紧绕在手腕上，松紧控制在舒适的程度。

◆ 请不要将腕带包住手腕外侧突起的腕骨进行测量。

◆ 若腕带绑得太紧，可能无法测量正确的血压。

4. 腕带的剩余部分可方便地向后折叠。



步骤四 如何进行测量

绑好腕带后，可随时进行测量。


1. 请舒适自然地坐好，手心向上并放松。请保持血压计的位置与心脏同高。



11

操作步骤

2. 触摸液晶显示屏的中央位置开机，再按一次开始测量，血压计自动充气约 220mmHg。

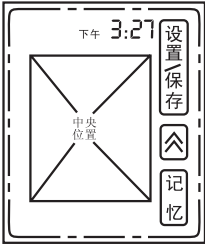

3. 血压计加压完毕后，腕带会自动排气。当测到脉搏时，心跳符号♥会在显示屏左上角闪动，与您的心跳同步跳动。

4. 测量完毕后，显示屏会自动显示测得的数值。即高压、低压和脉搏的数值会显示在显示屏中。*另外，血压计会自动保存测量结果。

注意：

- ◆测量过程中请不要动，保持安静，直到测量结束。
- ◆请把血压计与心脏保持同一水平直到测量结束。

◆测量过程中若要停止测量，只要再按一次显示屏中央区域即可。

5. 测量完毕，如需关闭血压计，只需按住显示屏中央区域超过2秒即可。

◆超过3分钟不使用血压计，它将会自动关机。

（联合国）世界卫生组织血压级别指引

	高压 (毫米汞柱)	低压 (毫米汞柱)
正常	<140	<90
血压偏高	140-180	90-100
高血压	>180	>100

*步骤五 如何使用记忆功能

本血压计可保存 60 组测量数据。每次测量结束后，血压计会自动保存测量结果。测量结果包含血压值、脉搏数和测量时间。

注意：

- ◆ 为了正确记录测量结果，建议在进行测量之前，先设定正确的日期和时间。
- ◆ 最近一次测量记录会记录成最近的记录，即第1组数据。若血压计已保存了 60 组数据，当您保存第 61 组测量结果时，最早的一组数据将被删除，即第 60 组数据将被删除。

查看测量记录

1. 开机状态下，按“记忆”键可查看最近一次的测量记录。

2. 按增加/向上键，可向前翻看之前的测量记录。

- ◆ 测量记录中的测量时间和日期会在显示屏右上角交替显示。

3. 按“记忆”键可向后翻看较新的测量记录。

4. 清空测量记录。如需删除所有测量记录，可在血压计待机状态下（即刚开机时的状态），按住增加/向上键，再按住“记忆”键超过4秒，即可清空测量记录。

测量小贴士/测量小提示

- ⌘ 每次测量前休息5分钟。



- ⌘ 不要长时间重复测量，这会导致手腕充血而影响准确度。

- ⌘ 测量时不要移动和说话



- ⌘ 由于血压在低温时会升高，所以请避免在低于 20 摄氏度的环境中测量。



- ⌘ 测量前请避免锻炼、吃东西、抽烟、喝酒或其它会影响血压水平的活动。



- ⌘ 如果装置储存在零度以下的地方，为防止加压不足先将装置在温暖处放置最少1小时。



注意事项

- 请用湿布或中性清洁剂清洁本血压计，请勿用汽油或稀释液。
- 请勿将血压计暴晒于阳光下，或放在高温多尘的地方。如果长期不用本血压计，请取出电池。
- 请勿撞击或摔落本血压计。
- 请勿用力弯曲或拉伸腕带。
- 请勿用于测量血压以外的目的。
- 请勿自行拆卸或修理、改造血压计。
- 如果血压计加压时压力太大并让您感觉不适，请解开腕带并停止测量。

故障排除

测量过程中，以下错误信号可能会显示在显示屏中。



异常状态	原 因	解决方法
Err 1	腕带套得是否过紧或过松	重新套上血压计腕带
Err 2	充气是否出错	重新开始检测程序
Err 3	电量不足	更换新电池

异常状态	原 因	解决方法
显 示 屏 无 任 何 显 示	电池耗尽	更换新的电池
	电池安装错误	重新安装（限用碱性电池）
血 压 值 过 高 或 过 低；脉 搏 太 快 或 太 慢	腕带未绑好	请按照前面的 操作说明进行 测量
	手掌在测试中用力	
	测量姿势不正确	
	测量过程中说话或移动手臂	
血 压 计 再 次 加 压	使用者血压有偏高现象	对血压偏高者再次加压可测得更准的血压值
	测量中手臂摇动	请勿摇动手臂

规格说明

产品名称：腕式电子血压计
产品型号：WM-601
测量方法：示波仪法血压测量
测量范围：血压——0~220mmHg
 脉率——40~160 次/分
精准率： 血压—— ±3.75mmHg
 脉率—— ±8%
*记忆记录：60 个
产品尺寸：77×72×32mm
产品重量：108g（不包含电池）
操作环境：温度 5℃~40℃；
 相对湿度 80%或以下
电 源：2 节7号1.5 伏电池（限用碱性电池）
配 件：收纳盒，使用说明书，
 2节7号 1.5V 碱性电池

联系方式

售后服务单位:

佛山市顺德区依士文电子器有限公司

地 址: 广东省佛山市顺德区伦教北海大道二号
528308

电 话: 0757-27333502、27333503

邮 箱: sale2@easymed.com.cn

注册号: 粤食药监械(准)字 2008 第 2200401 号

执行标准号: YZB/粤 0166-2008

生产许可证号: 粤食药监械生产许 20020593 号