

聲寶牌

體脂計步器
使用說明書

BFM-01(B)

BFM-01(P)

BFM-01(W)

SAMPO
聲寶股份有限公司

家電事業部：桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號

消費者免費諮詢專線：(0800)005438〔鈴鐺—我是聲寶〕

網址：<http://www.sampo.com.tw>

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取。
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

安全注意事項

請記住本產品正確安全使用方法，避免危險及損害發生。如果有錯誤使用，將有以下“警告”及“注意”之重要注意事項，請確實遵守。



警 告

如忽視正確安全使用方法，將可能導致人員傷亡。

- 體內有裝脈搏調整器等機器之人員，請勿使用本產品。在測定本產品之體脂肪率時，會有微量電流經過體內。所以體內裝有醫療用脈搏調整器之人員。請千萬不要使用本產品，以避免重大意外發生。



注 意

如忽視正確安全使用方法，將可能導致人員受傷及產品壞損。

- 放入電池時請確認電池之陰陽極(−,+)位置，如果位置錯誤，將導致電池破裂、發熱、液漏、火災、受傷、燙傷之外意外發生。當更換電池時，請更換新電池。
- 請勿用指定外之電池，以避免電池破裂、發熱、液漏、火災、受傷、燙傷。
- 請將電池放置於兒童取不到之處，如兒童吞食電池，請盡速送醫治療。


首先感謝您選購體脂計步器，使用前，請詳讀本使用說明書，並活用本產品，以做為您個人之健康管理顧問。並請妥善保管本使用說明書與保証書。

本產品之體脂肪率及體脂肪燃燒量，將供個人參考。並祝您在愉快步行中享受自然減少體脂肪之效果。

特 點

- 具時間、步數計、計算體脂肪及所消耗之卡洛里等功能。
 - 本產品分五階段表示使用者之肥胖度。
 - 本產品依步行所燃燒之體脂肪以KC表示。
 - 本產品從一到十萬(0~99,999)來計算使用者步行及慢跑之次數。
 - 裝帶簡單，並且採用強力彈簧夾，即使使用中也不易掉落。
 - 字型大容易閱讀。
- 以上資料
將提供產
品使用者
參考

各部名稱與功能

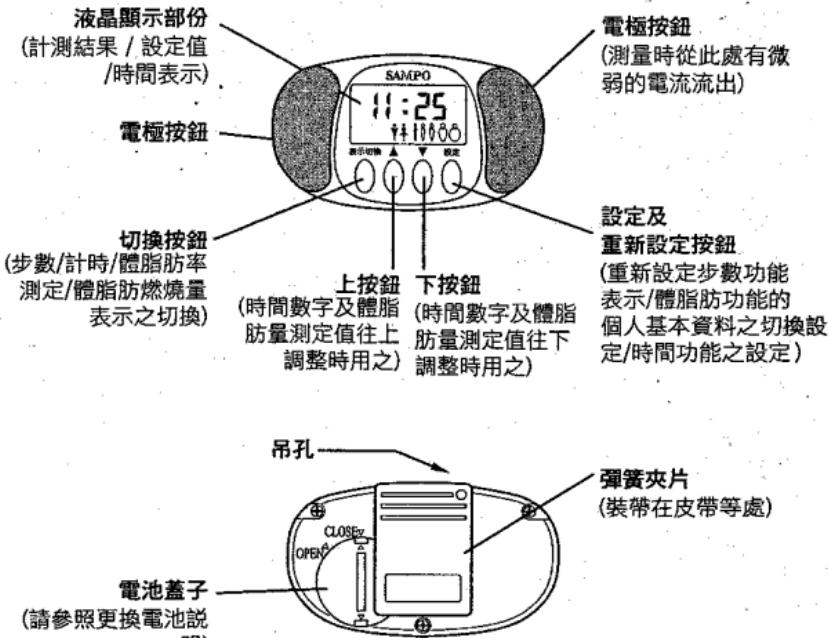


*沒有電源開關按鈕

使用方法

1. 行走步數之測定

按下表示切換鍵，使其顯示在〈行走步數測定〉功能上（如圖1）。

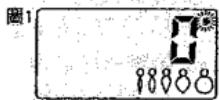

2. 體脂肪量測定

1) 先輸入測定者之基本資料


· 體重設定(kg) _____ 按切換按鈕“體脂肪率”功能會顯示kg。按上／下按鈕輸入體重。（圖2）



· 身高設定(cm) _____ 按設定及重新設定按鈕會顯示cm。按上／下按鈕輸入身高。（圖3）



· 年齡設定(才) _____ 按設定及重新設定按鈕會顯示“才”。按上／下按鈕輸入年齡。（圖4）

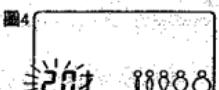

· 性別設定(男／女) _____ 按設定及重新設定按鈕會顯示“男”或“女”。按上／下按鈕輸入性別。（圖5）




*按上／下按鈕2秒以上數字變化速度會加快

*除非使用者變更資料，體脂肪計步器會自動記憶使用者輸入之基本資料（體重／身高／年齡／性別）。如需更換電池時，則需重新設定數值。



2) 測定

資料輸入後將兩手拇指各按在電極上，如右圖之測定姿勢，請勿離開電極之按鈕，至測定結束為止。

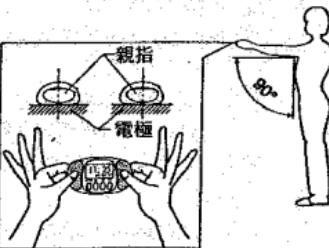

★正確測定姿勢及測定狀態



- 將兩手拇指分別平貼按在電極按鈕上如圖所示。
- 雙腳站立，雙手往胸前平舉與身體成垂直90度測定。
- 當使用者雙手拇指平貼按在電極按鈕時，此時勿將左右兩手手指相互觸碰。
- 請穿著鞋或拖鞋站立測試。
- 測定中請勿移動雙手與身體。
- 請勿平躺或坐立測試。
- 如感覺雙手過於乾燥，可用濕紙巾或濕毛巾擦拭，使其手指保持濕潤。
- 體脂肪率之數值受身體水份變化之影響，以下之情況為影響體脂肪率量測正確與否之因素：
 1. 激烈運動後／入浴及泡澡後。
 2. 喝過量水份、飯後一兩個鐘頭內／喝酒後。
 - 測定時上段虛線燈先亮，然後底下人形圖樣部份也將從左至右亮燈。
此為測定開始之狀態。
 - 測定結束後，體脂肪率以百分比%表示，同時5階段評論也會顯示。
此為體脂肪率之狀態。
再按按鈕就回到體重設定畫面。

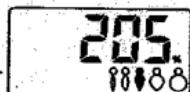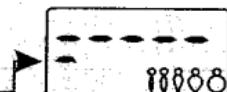

3) 關於錯誤“ERR”之表示


體脂肪率測定時，錯誤“ERR”顯示原因如下：

- “LO”表示亮燈時。
- 使用者輸入資料時數值過於極端(體脂肪率在5.5%以下或60%以上會顯示)
- 測定時無正確觸押電極按鈕。
- 測定時觸押電極按鈕過輕會出現“ERR”，此時請重新正確觸壓。
- 測定時手指過於乾燥。

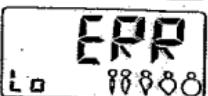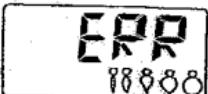



3. 體脂肪燃燒量表示

- 按切換按鈕會顯示“體脂肪燃燒量”並在畫面右側出現“KC”字樣。
- 使用體脂肪率功能將體重／身高／年齡／性別作設定，步數計會計算體脂肪燃燒量，並以 KC 表示。
- 體重／身高／年齡／性別設定不正確，將導致數據不準確。
- 步數0時將以0.0KC表示，不到0.1KC也會以0.0KC表示。
- 體脂肪燃燒量以(KC)表示，步數與體脂肪燃燒量有連帶關係，按設定及重新設定按鈕時，數值將會從0開始，當步數至99999時，將從0開始重新計算。

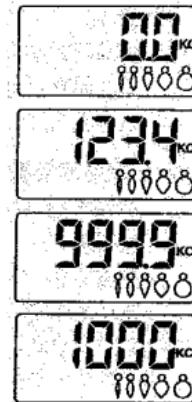


4. 時間表示

- 按切換按鈕會顯示“時間”功能。(圖6)
 - 按設定及重新設定按鈕2秒以上，就會顯示“時間設定功能”。
 - 時之設定 按上／下按鈕來設定時間(圖7)。確認時請按設定及重新設定按鈕。
 - 分之設定 按上／下按鈕來設定分(圖8)。確認時請按設定及重新設定按鈕。
- * 按上／下按鈕3秒以上，數字變化速度會加快。

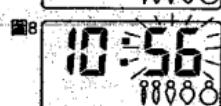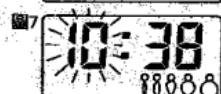


電池弱電之表示

- 電池電力不足時，左下角會出現“LO”字樣。(圖9)
- “LO”字樣閃爍時，則需更換新電池，如繼續使用舊電池，則測定結果將會不準確。

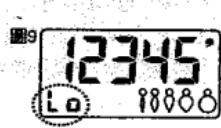

正確裝帶方法

- 用彈簧夾片正確固定於皮帶、褲子、裙子或運動褲上如右圖。
- 體脂步數計最好的裝帶位置為皮帶與褲子折線交接處。
- 體脂步數計裝帶不緊或有傾斜現象，將導致掉落同時數值會不精準。
- 本產品之吊孔處，可使用市面上販賣之行動電話吊帶，此搭配不但可做裝飾，且可避免計步器掉落。

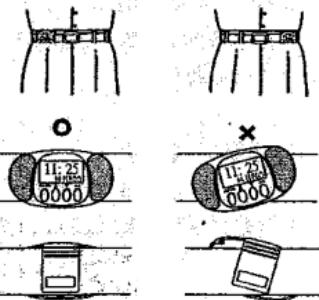

步行之注意事項

1. 須抬頭挺胸，步幅一致，才可正確得到測定結果。

2. 以下是不正確之步行方式：

- 步行時拖步。
- 行走於斜坡或下樓梯。
- 快跑或步幅不一致。
- 穿著涼鞋、拖鞋等。

3. 步行以外之上下跳動運動及振動將影響測定結果：

- 運動時、站立、坐下、跳動及運動前暖身運動等動作。
- 搭乘交通工具(腳踏車／公車／火車等)所產生劇烈振動。

⚠ 使用時注意事項

1. 以下為不正確使用本產品之方法：
 - 本產品是精密電子產品，所以請勿 1. 強烈撞擊 2. 淋到水及其它液體 3. 弄髒。同時，勿在潮濕之場所使用以及流汗時觸碰本產品，如此將導致液晶顯示之部份壞損及記憶體之資料流失，以上之不正確使用方法，將影響測定結果，同時勿在高溫、潮濕、低溫之處使用及存放在本產品。
 - 機器的清潔須用軟性乾布擦拭，請勿使用石油精等揮發性液體擦拭，避免本產品壞損。
 - 本產品棄置時，請以不燃物報廢處理。如燃燒破裂，將會產生有毒氣體。
 - 請勿自行分解，改造及修理本產品，如此將可能導致使用者受傷及產品故障無法再修理。
 - 本產品之測定數值有稍許誤差。
 - 溫濕度過高將影響測定結果，同時，電池弱電“LO”會比較早顯示。
 - 測定者之體型，體質及身體狀況將影響測定結果。
 - 以下之測定者，將無法測得正確之測定結果。
 - 孕婦、職業運動員、洗腎者、粗骨症患者及感冒發燒者。
 - 同時在不同環境測試結果也有不同。
 - 如在不正確測定方式下測定，將會有“ERR”之字樣顯示。

產品規格

計數範圍.....	0~99999 (99999以後歸零)
計數單位.....	步數 (1步)
計數重新設定.....	按1次重新設定方法
表示方法.....	液晶數位表示
表示尺寸.....	72.0 X 42.0mm
精確度.....	± 10%以內 (本公司測試機)
體脂肪率.....	5.5%~60% (變化量0.1%)
體脂肪率測定溫度範圍.....	10°C ~ 30°C
體脂肪燃燒量.....	0.1KC~9999.9KC
最大表示	步數10萬步MAX (變化量1步, 0.1 Kcal)
時間功能.....	時.分 12小時表示
使用電池.....	CR2032 (1個)
電池壽命.....	約1年 (體脂 2 次/日)
使用溫度範圍.....	0°C ~ 40°C
產品尺寸.....	66×51×13.8mm (夾片)
產品重量.....	約37g

體脂肪量測定

體脂肪在體重所占之百分比%稱之為體脂肪率，通常成年男子為10%~20%，成年女子為20%~30%。

本產品所提供之體脂肪率將供您做健康管理之參考，並祝您在愉快的步行中享受自然減少體脂肪之效果。

◆身體條件的設定範圍

· 身高 100cm~220cm	每1cm起算
· 體重 20kg~130kg	每1kg起算
· 年齡 10歲~80歲	每1歲起算

什麼是體脂肪燃燒量

在步行時燃燒的脂肪量將以卡洛里(KC)表示之。

電池更換

1. 本產品後面之電池蓋子，用銅板將▼轉至OPEN之位置開啟。
2. 舊電池取出，放入新電池，將新電池+極朝上。
3. 更換電池後蓋上電池蓋，將▼轉至CLOSE之位置關閉。