

SAMPO

聲寶股份有限公司

生產國別：中華民國

家電事業部：桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號

消費者服務專線：080005438

網址：<http://www.sampo.com.tw>

售後服務代理：誠寶科技股份有限公司

顧客諮詢專線：080025111 服務電話：(02) 22980077

SAMPO

聲寶牌

腕錶型血壓計

使用說明書

BL-1000P

CARE YOUR LIFE!




- 隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取，並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。


目次說明

- 一、 各部位名稱
- 二、 顯示幕標記說明
- 三、 測量前準備
- 四、 測量方法與步驟
- 五、 注意事項
- 六、 規格說明

一、各部位名稱

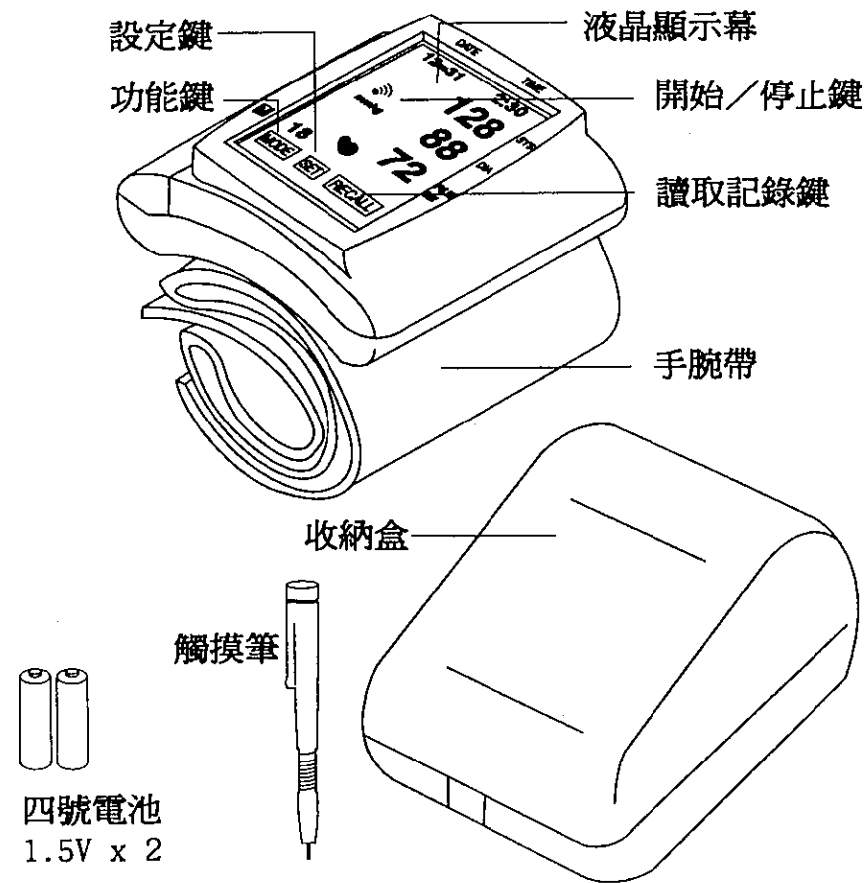


二、顯示幕標記說明

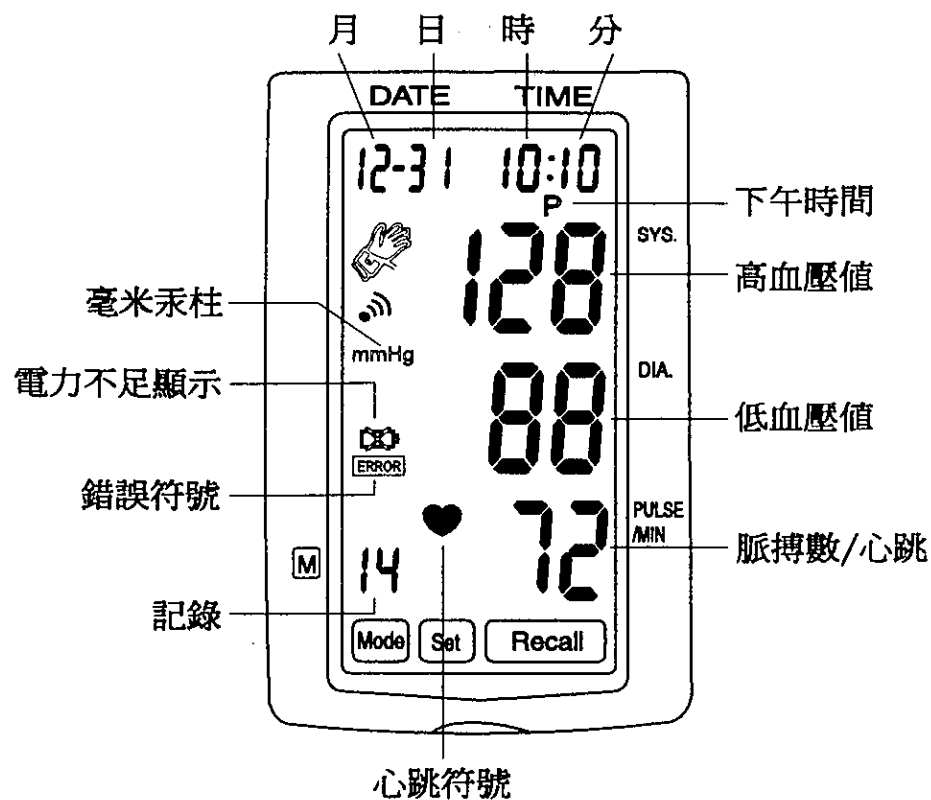

三、測量前準備


1、安裝電池

- 1) 將電池蓋向下滑開（如下圖示），依正負極性裝入電池。
- 2) 當要取出電池時請使用筆或細尖物協助之。

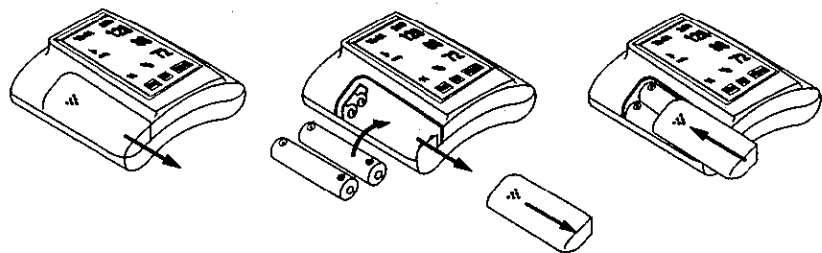


2、手腕帶之綁法

- 1) 手心向上，產品也向上，並將手腕帶繫於離手腕關節5-10mm之處。

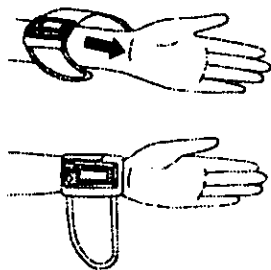


- 2) 將手腕帶下面之部份，以右拇指按住上方，往上拉緊繫上，勿留空隙(如不將手腕帶正確綁好，可能無法測得正確之血壓。

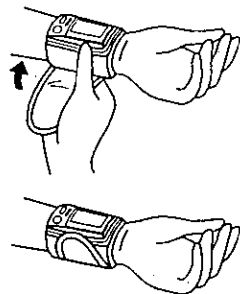

3、測量時之姿勢

將手心向上放鬆，左手放在收納盒上使手腕帶之位置與心臟同高。

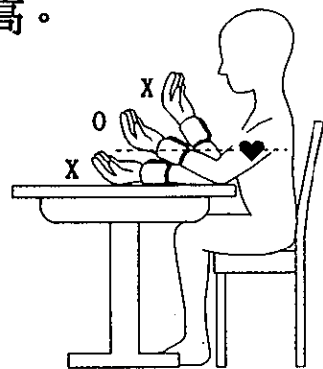

四、操作方法與測量步驟

1、設定日期及時間

- 1) 按 'MODE' 鍵，'月' 閃爍
按 'SET' 鍵調整月份1-2-....12
- 2) 再按 'MODE' 鍵，'日' 閃爍
按 'SET' 鍵調整日期1-2-....31
- 3) 再按 'MODE' 鍵，'時' 閃爍
按 'SET' 鍵調整時1-2-....11-12p..
-1p...12(*12小時制)
- 4) 再按 'MODE' 鍵，'分' 閃爍
按 'SET' 鍵調整分00-1....59
- 5) 再按 'MODE' 鍵，回一般狀態
(顯示只顯示月日時分的狀態)

2、測量步驟

- 1) 將手腕帶綁上手腕(參考前頁之說明)
- 2) 請正坐在椅子上，手心向上放鬆，左手放在收納盒上，使手腕帶之位置與心臟同高(參考前頁之說明)
- 3) 按下 'LCD' 中間部份後，機器會自動加壓到185mmHg血壓值，若血壓可能偏高時則幫浦會再自動加壓至理想壓力值(量測中請勿搖手或說話)
- 4) 加壓完成後，壓力會逐漸下降，當測到脈搏時"心"形符號會開始閃爍與心跳同步
- 5) 測量完成後顯示高低壓值與心跳數，約60秒過後，顯示幕會自動消失以節省電力

6) 中止測量

請按"LCD中間部份"鍵，即停止測量，
回到一般狀態

3、量測值之儲存，讀取及清除

1) 量測值之儲存

每次量測完成後，所量測之高低血壓，
脈搏數及當時量測之月日時分皆立即自
動儲存，最大儲存資料為最新量測的14
筆資料，超過14筆以上的舊資料則自動
刪除。

2) 量測值之讀取

*在一般狀態下，按"RECALL"鍵，若無
儲存資料則不會顯示任何資料，有資料
時則"M"顯示最新量測值及該筆資料量
測完成時之月日時分。

*再按"RECALL"鍵，讀取下一筆資料，
"M"會顯示第幾筆資料。當資料讀取結束
或已讀取14筆資料後再按"RECALL"鍵則
回一般狀態。

"M" 14-13-12-11-10...1 回一般狀態
↓ ↓
最新資料 第14筆資料

3) 量測值之清除

拆下電池，再裝回電池，按"RECALL"鍵
，若無任何資料顯示，表示清除完成。

4) 更換電池

當顯示幕出現"  "符號時，表示電力
不足，請更換電池，否則無法量測血壓。

五、注意事項

- 5) 動脈硬化，糖尿病，肝臟病，非常嚴重之高血壓，末梢血管循環不良的病患，請依照醫生之診斷指示來配合使用本產品。

1、異常狀態之自我檢定

異常狀態	檢查地方	改正方法
顯示幕無任何顯示	1.電池是否沒電 2.電池方向是否放錯	1.換新電池 2.檢查正、負極方向
量血壓時產生ERROR或血壓異常高或低，脈搏太快或慢時	1.手腕帶未定位 2.手掌是否用力 3.量測中是否說話或移動 4.量測中姿勢是否正確	1.務必依照前頁說明書之步驟仔細操作與遵守
造成再次加壓	1.本身血壓可能有偏高現象 2.量測中手是否有搖動	1.血壓偏高再次加壓可量到更準確的血壓值 2.勿搖動手臂

2、保養

- *以沾水或中性洗潔精之濕布擦洗，然後以乾布擦乾
- *勿使用汽油，松香油等刺激性東西擦拭

3、保管

- *將產品放置在收納盒內
- *勿直接照射日光及放在高溫，溼氣重及灰塵多的地方

4、防止故障

- *勿將腕帶任意扭曲
- *手腕帶未綁在手腕時，勿加壓
- *勿分解或改造主機及腕帶
- *勿讓主機有強烈之衝擊或掉落

六、規格說明

1. 測量方式	壓力感應式測量
2. 測量範圍	壓力0-300mmHg，脈搏40-200拍/分
3. 精確度	壓力+/-3mmHg，脈搏+/-5%
4. 加壓	全自動加壓方式
5. 減壓	自動定速排氣方式
6. 排氣方式	自動急速排氣方式
7. 顯示方式	數字型表示方式
8. 記憶組	14組
9. 產品體積	長70×寬72×高29mm
10. 本體重量	約133克
11. 電源	UM4(AAA)1.5V×2
12. 電池壽命	250次量測次數