

生產國別 | 中國

User Manual

使用說明

產品特點

超省力 安靜無噪音

符合人體工學設計，簡單操作、組裝容易，單手即可操作，快速減輕媽媽脹奶疼痛、集乳過程安靜。

吸力穩定 舒適按摩

吸力可依自己的需求，自行控制吸乳節奏，不疼痛，乳頭連接墊片上軟凸點，可幫助與乳房更貼合，達到舒適的按摩效果。

完全消毒 不含雙酚A

本產品所搭配的零配件是採用食品級，不含雙酚A環境賀爾蒙，不影響人體健康，可高溫消毒不變形。

多孔仿乳線十字孔專利奶嘴



多孔十字線設計，模仿媽媽乳頭泌乳方式，寶寶吸乳順暢不溢奶，雲點乳首設計，具去舌苔功能，能保護寶寶口腔衛生，同時具安撫效果。

吸乳要點及注意事項

1. 剛生產完，出乳較少階段，要使用吸乳器，請依照醫生指導使用。
2. 乳腺炎，乳頭塌陷、扁平者，請接受醫師指導使用。
3. 以手擠壓乳房無法出乳者，請勿使用本產品。
4. 吸乳前按摩乳房或覆蓋溫濕巾，可促進母乳分泌，較易擠乳。
5. 請勿過度使用或不間斷使用吸取母乳。

操作方法

1. 使用前請先洗淨雙手，零配件清洗、消毒乾淨後，將產品組合(圖一)，各部件需緊密結合，不可洩氣，再將乳房連接墊片貼緊乳房(圖二)。
2. 輕握握把直到乳房感覺有吸力。
3. 以輕快的節奏按壓握把，如模仿寶寶的吸吮動作，握把按壓時，先按摩乳房，當按壓一半時，即時放鬆，可達吸乳效果。
4. 當乳汁開始流出後，放慢按壓速度，再按壓到底，模仿寶寶吸吮，可發揮最佳效果。

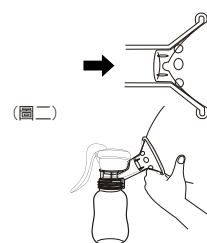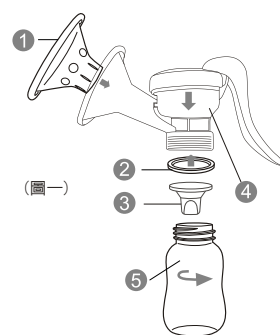

清潔注意事項

第一次使用前及每次使用後以柔性清潔劑或溫水清洗所有零件，可將奶嘴，奶瓶，吸乳罩等配件置於消毒鍋內消毒。

消毒完成，請烘乾或擦拭乾淨並防止螞蟻進入，準備好供下次使用。

關於售後服務

請在送修前請先檢查清楚是否因為零件未緊密結合造成吸力不足。

或請再次確認吸乳罩與乳頭連接墊片是否緊密結合造成吸力不足。

送修前，請先聯絡客服專線 02-89904440，將產品型號及故障情形詳細說明，

客服人員會協助處理，絕對不要自行拆開外殼進行修理。